

SPÁRUJTE SOUND ASSIST SE SVÝMI SLUCHADLY

PÁROVÁNÍ SE SLUCHADLY:

Widex Sound Assist je potřeba nejprve spárovat se sluchadly a teprve poté jej můžete spárovat i s ostatními BT zařízeními (telefonem, notebookem atd.)

- Ujistěte se, že je Widex Sound Assist vypnutý a restartujte svá sluchadla. Sluchadla budou po dobu 3 minut v párovacím režimu.
- Na zařízení Widex Sound Assist stiskněte a podržte současně tlačítko Zvýšení hlasitosti (3) a Vypínač/Přepínač režimů (6) po dobu 3 vteřin, dokud se Indikátor (1) nerozsvítí modře.
- Udržujte obě zařízení ve vzdálenosti max. 1 metr od sebe.
- Proces párování se zahájí automaticky a jakmile bude úspěšně dokončen, Indikátor (1) problikne zeleně.

Widex Sound Assist lze spárovat pouze s jedním párem sluchadel. Zařízení Sound Assist je kompatibilní s modely sluchadel Widex MOMENT/MAGNIFY s technologií 2,4 GHz (modely mají v názvu písmeno D).

PÁROVÁNÍ S DALŠÍM ZAŘÍZENÍM:

- Vypněte Sound Assist a aktivujte BT v nabídce svého BT zařízení (telefon, notebook atd.). Stiskněte současně tlačítko Zvýšení hlasitosti (3) a Vypínač/Přepínač režimů (6) na 3 vteřiny, dokud Světelné indikátory nezačnou svítit modře.
- Udržujte obě zařízení ve vzdálenosti max. 1 metr od sebe.
- Přejděte do nabídky BT na svém zařízení a zvolte Sound Assist ze seznamu dostupných zařízení. Po úspěšném párování začnou světelné indikátory (1) zeleně blikat.

Widex Sound Assist je možné spárovat až s 8 jinými BT zařízeními, aktivně připojené však může být vždy jen jedno.

WIDEX

ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ



Widex je registrovaná ochranná známka společnosti WIDEX A/S.
Printed by Rosendahls a/s. 2023-01. 9 502 5975 001 #02

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
App Store je známka služby Apple Inc.

Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Možnost změny bez předchozího upozornění vyhrazena.



RYCHLÝ PRŮVODCE

WIDEX SOUND ASSIST

WIDEX

ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ

SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM SOUND ASSIST

Widex Sound Assist představuje malý, ale univerzální nástroj pro Vaše sluchadla. Můžete jej použít jako stolní nebo vzdálený mikrofon, jako hands-free pro telefonování, pro přenos zvuku z digitálních i analogových zdrojů nebo jako dálkový ovladač Vašich sluchadel. Widex Sound Assist obsahuje také Indukční cívku, která Vám umožní přijímat zvuk z indukčních smyček ve veřejných prostorách.

Světelné Indikátory (1)



Středové tlačítko (2)

Přepínač programů (5) Snížení hlasitosti (4) Zvýšení hlasitosti (3)

Diody Mikrofonu, Bluetooth a Indukční cívky (7)

Vypínač/Přepínač režimů (6)

Kovová spona (8)



Micro USB konektor

RYCHLÝ PRŮVODCE

Zapnutí a vypnutí Widex Sound Assist

Stiskněte a podržte Vypínač/Přepínač režimů (6) po dobu 2 vteřin.

Změna režimu

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuto.
- Pro přepínání mezi režimy krátce stiskněte Vypínač/Přepínač režimů (6).
- Světelné diody označují zvolený provozní režim.



Aktuálně zvolený režim indikují tři světelné diody (7).

Nastavení hlasitosti streamování

Krátce stiskněte tlačítko Zvýšení (3) nebo Snížení (4) hlasitosti.

Jak nosit Widex Sound Assist

Použijte kovovou sponu (8) nebo smyčku okolo krku, která je součástí balení.

Uzamčení tlačítek pro zamezení nechtěného stisknutí

- Stiskněte současně tlačítko Zvýšení hlasitosti (3) a Přepínač programů (5). To samé zopakujte pro odemčení tlačítek.
- Světelné indikátory (1) dvakrát bíle probliknou, na znamení uzamčení / odemčení tlačítek.

Nabíjení

K nabíjení Widex Sound Assist použijte micro-USB kabel, který je součástí balení. Zařízení je plně nabito za tři hodiny.

VZDÁLENÝ MIKROFON

Tento režim aktivujete krátkým stisknutím Vypínače/Přepínače režimů (6).

Světelná dioda (7) mikrofonu se rozsvítí zeleně.

Partnerský mikrofon

- Předáte-li Sound Assist svému konverzačnímu partnerovi, bude jeho hlas automaticky přenášen do Vašich sluchadel.

Stolní mikrofon

- Nejlepšího výsledku dosáhnete, když Widex Sound Assist umístíte na rovný povrch.

Pokud se chcete soustředit na hovor konkrétní osoby, můžete uzamknout směr poslechu vpřed a manuálně nasměrovat zařízení na tuto osobu.

- Stiskněte a podržte Středové tlačítko (2), dokud se vrchní světelný indikátor nerozsvítí zeleně.
- Natočte Widex Sound Assist směrem k osobě, na kterou se chcete soustředit.
- Pro zrušení směrového poslechu, opět stiskněte a podržte Středové tlačítko (2).

Vypnutí okolního zvuku

Pro lepší soustředění na přenášený zvuk můžete ztlumit mikrofony sluchadla a nebyt tak rušení okolními zvuky.

- Stiskněte a držte tlačítko Snížení hlasitosti (4) po dobu nejméně 3 vteřin.
- Pro opětovnou aktivaci mikrofonů stiskněte a držte tlačítko Zvýšení hlasitosti (3).

BLUETOOTH STREAMOVÁNÍ

- Pro aktivaci režimu Bluetooth krátce stiskněte Vypínač/Přepínač režimů (6).
- Světelná dioda (7) Bluetooth se rozsvítí zeleně.

Hands-free telefonní hovory

Pomocí Widex Sound Assist můžete přijímat nebo ukončovat telefonní hovory a streamovat hovor přímo do svých sluchadel.

PŘÍCHOZÍ HOVORY

Přijmutí hovoru	Krátce stiskněte Středové tlačítko (2).
Ukončení hovoru	Krátce stiskněte Středové tlačítko (2).
Odmítnutí hovoru	Stiskněte Středové tlačítko (2) na 2 vteřiny.

ODCHOZÍ HOVORY

Volání	Hovor zahájíte standardně z Vašeho telefonu. Váš hlas ale směřujte do mikrofonů Sound Assist (na jeho horní ploše).
---------------	---

Použití hlasové asistence

- Ujistěte se, že Bluetooth zařízení připojené k Sound Assist má aktivovanou funkci hlasové asistence.
- Stiskněte a držte Středové tlačítko (2) po dobu 2 vteřin a poté můžete zadat hlasový příkaz.

Streamování audia

Pro přenos zvuku z jiného Bluetooth zařízení přímo do sluchadel je nutné provést párování. V nabídce BT příslušného zařízení zvolte Widex Sound Assist anebo uveďte obě zařízení do párovacího režimu a umožněte tak jejich spárování.

Přehrávání/pauza	Krátce stiskněte Středové tlačítko (2).
Následující skladba	Dvakrát stiskněte Středové tlačítko (2).
Předchozí skladba	Tříkrát stiskněte Středové tlačítko (2).

Dálkový ovladač

Když Sound Assist nepoužíváte pro streamování, můžete jej využít jako dálkový ovladač, tedy měnit poslechové programy nebo hlasitost.

Pro aktivaci dálkového ovladače nejdříve zvolte režim Bluetooth.

Změna poslechového programu	Krátce stiskněte Přepínač programů (5). Pokud je na Vašem sluchadle nastaven program Zen+, aktivujete jej dlouhým stisknutím Přepínače programů (5). Krátkým stisknutím tohoto tlačítka (5) pak volíte z dostupných stylů Zen.
Nastavení hlasitosti	Krátce stiskněte tlačítko Zvýšení (3) nebo Snížení hlasitosti (4).



INDUKČNÍ PŘENOS

Widex Sound Assist umožňuje v režimu indukční cívky přenášet zvuk z indukční smyčky ve veřejných prostorech (např. divadlo, bankovní přepážka atd.)

- Krátce stiskněte Vypínač/Přepínač režimů (6) a zvolte diodu T.
- Světelná dioda (7) T se rozsvítí zeleně.
- Pro zahájení nebo ukončení přenosu zvuku z indukční cívky krátce stiskněte Středové tlačítko (2).