

TV-DEX の使い方

TV-ベースとテレビの接続

下記 a.~c. のいずれかでテレビとTV-ベースを接続します。

a. テレビのヘッドホン端子へ接続

付属の両端がミニプラグのケーブル（）で、接続します。



！ テレビのスピーカーからも音を出すには？

例1) シャープ アクオス

メニューボタン ▶ 機能切換 ▶ ヘッドホン設定 ▶ モード1 → モード2

例2) ソニー ブラビア

ホームボタン ▶ 設定 ▶ 音質・音声設定 ▶ ヘッドホン使用時設定 ▶
▶ 「ヘッドホンのみ使用」→「スピーカー・ヘッドホン併用」

例3) パナソニック ビエラ

メニューボタン ▶ 設定する ▶ 音声の設定 ▶
▶ スピーカーとイヤホン音声の同時出力 ▶ 「しない」→「する」

※注意：同じメーカーの製品でも、設定がないテレビもあります。

b. テレビやケーブルテレビのセットトップボックスの音声出力端子へ接続

付属の片側が赤・白の音声ケーブル（）で、テレビとTV-ベースを接続します。



c. テレビやケーブルテレビのセットトップボックスのデジタル音声出力端子（光）へ接続

別売の「TV-DEX用オーディオ変換器」をご購入ください。

TV-DEX用オーディオ変換器 10,000円（税別）




TV-DEXを使う前に

TV-DEXを付属のACアダプターを使い、コンセントと接続します。

TV-コントローラーを、TV-ベースに立てて置き、充電します（初回のみ8時間）。



日本のコンセント用のプラグを「カチッ」と音がするまでスライドします。

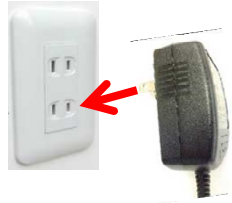

端子の広い方が上



充電中は、緑と赤のLEDがゆっくり点滅します。

TV-DEXを使う

1. 電源を入れる



TV-コントローラーを充電台から外し、首にかけて電源を入れます。

電源ボタンが緑色に点灯します。

2. テレビの音量を大きくする・小さくする



+ボタンで
ボリューム上げ

-ボタンで
ボリューム下げ

※補聴器及びテレビ
本体のボリューム操
作はできません。

3. 補聴器のマイクからの音を一時的にオフにする



ⓧ ボタンを押すと、

ⓧ ボタンが赤く点灯し、補聴器のマイクがオフになって、TV-DEX経由の音のみが聞こえます。

再度 ⓧ ボタンを押すと、補聴器のマイクからの音も入ります。



電源を入れても、
電源ランプが点灯しない場合



● 電源ランプが緑の早い点滅の場合

・TV-ベースと距離が離れている

⇒ TV-ベースの通信範囲内（10m以内）に入ってください。

・TV-ベースとペアが解除されている

⇒ TV-コントローラーをTV-ベースに5秒以上置いてください。

● 電源ランプが緑のゆっくりした点滅の場合

・接続コードがしっかり取り付けられていない可能性があります。

⇒ 正しく接続し直してください。

使用後

TV-ベースにTV-コントローラーを戻し、充電してください。