


EVOKEアプリ 操作ガイド -第2版-

EVOKEアプリ V1.2

<EVOKEアプリ メイン画面>

メニューボタン :

アプリのバージョン確認や補聴器を探す機能を使用する場合、タップします。

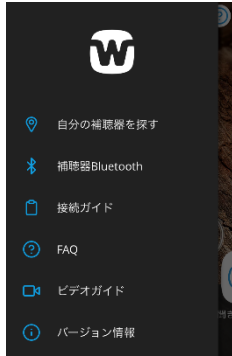


ヘルプボタン

ステータスボタン :

タップすると補聴器との通信状態や電池残量を表示されます。

● EVOKEと接続済み
電池残量OK

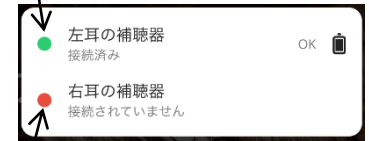


● EVOKEと通信不良

プログラム切り替え :

左右にスクロールし、切り替えたいプログラムをタップします。

DEXとストリーミング中はプログラムアイコンが「DEX」表示になります。

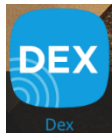

優先コントロールボタン : (音量調節)

スライダーを左右に動かし音量調節します。

🔊 音量上げる

🔊 音量下げる

ミュート (消音) ボタン :

タップすると補聴器のマイクがオフになります。


<音質調整画面>

SoundSense Learn :

(サウンドセンス ラーン)


聞こえた音質をお客様が評価していくことで、お客様の好みに近づけていきます。

詳しくは、3ページをご参照ください。

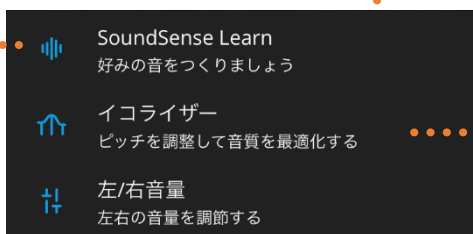

イコライザー :

低・中・高帯域ごとにバランスを微調整できます。

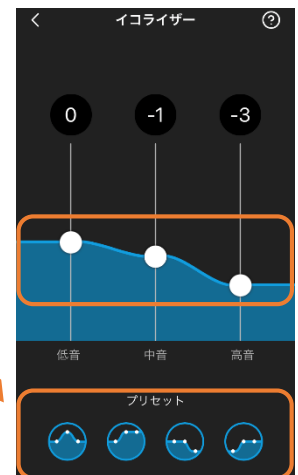

左/右音量 :

左右の補聴器の音量を個別に調節できます。




リセット : 音質調整の内容を取り消す際にタップします。


予め用意されている設定を試すこともできます。

ストリーミング中の「音質調整」

※Androidは、DEXやテレコイル使用の場合

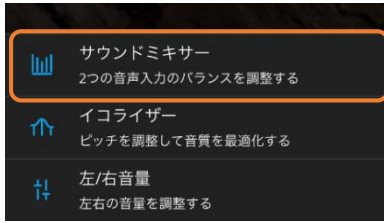

サウンドミキサー：
マイク入力音と他の音(ストリーミング音やテレコイルからの入力など)のバランスを調整するミキサー。

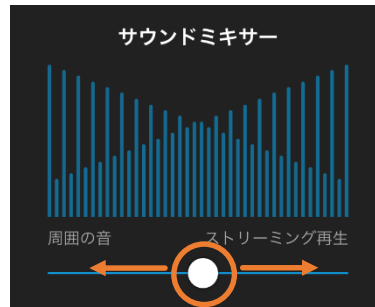


周囲の音（マイク入力音）をよく聞きたい場合、スライダーを左へ。

電話・音楽などのストリーミング音やテレコイルの音をよく聞きたい場合は、スライダーを右へ。

<お気に入りプログラム>

SoundSense Learnやイコライザーを動かして、好みの音質にした状態をお気に入りプログラムとして登録することができます。

1. 音質を変えたら、画面左上の「<」ボタンで戻ります。

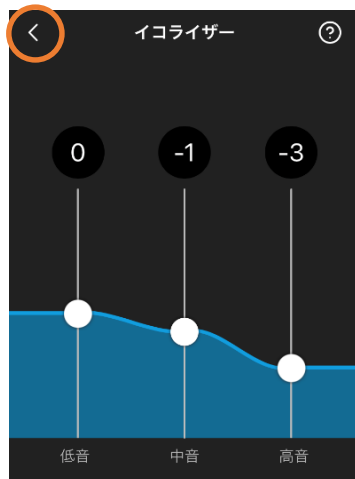

2. 設定を保存する場合は「名前を付けて保存」をタップします。



3. 登録する設定に名前を付け、アイコンを選択し、「作成」ボタンをタップします。



参考：プログラムのカスタマイズ

登録したプログラムを選択し「音質調整」をタップします。



画面右上の「…」をタップするとカスタマイズのメニューが表示されます。



カスタマイズした内容をリセットします。

プログラム名やアイコンの変更

メイン画面に表示される画像を変更

選択したお気に入りプログラムの設定内容の表示

スマートフォンの位置情報を保持し、その場所に移動したら、自動的に該当するプログラムに切り替わる。

選択したプログラムの削除


<SoundSense Learn (サウンドセンス ラーン) >

EVOKEアプリ上でお客様が2つの音を聞き比べ選択していくことで、よりお客様好みの音に近づけることができます。


1. 音質調整をタップします。




2. SoundSense Learnをタップします

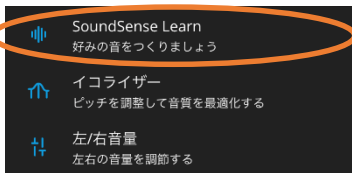


3. 「分かりました」をタップします。

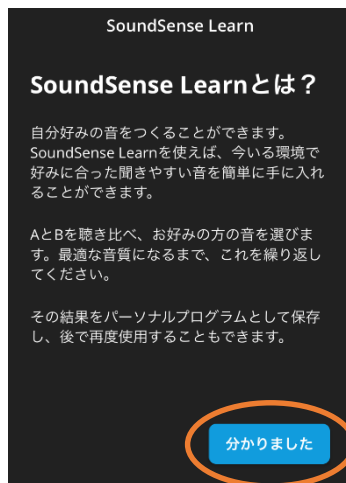

4. お客様がいらっしゃる環境に近いものをタップします。

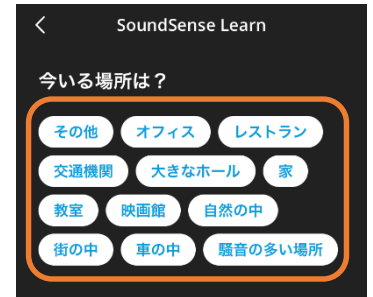

5. お客様がよく聞きたいものをタップします。

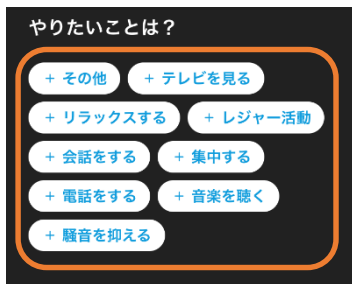

6. 「次へ」をタップします。



7. 音の種類Aを聞き、続いてBをタップして聞き比べます。



8. スライダーを使って評価します。




9. 次へボタンをタップします。



10. 何パターンか音の種類AとBを聞き比べ、評価します。



11. 「次へ」をタップし、聞き比べを続けます。

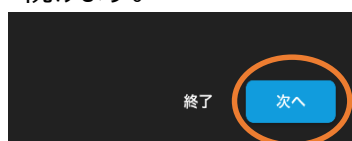

「終了」をタップすることで聞き比べを途中で終えることもできます。



途中で終えるとそこまでの評価が反映されます。


12. 結果を保存する場合は「保存」を、保存せず終了する場合は「終了」をタップします。




保存手順は、2ページの「お気に入りプログラム」をご覧ください。


<補聴器を探す>

補聴器とEVOKEアプリが通信したスマートフォンの位置情報を表示します。

「」▶「自分の補聴器を探す」の順にタップします。

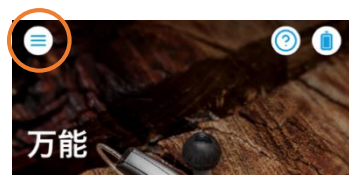


マップ
アプリが接続できていた場所を地図上に表示

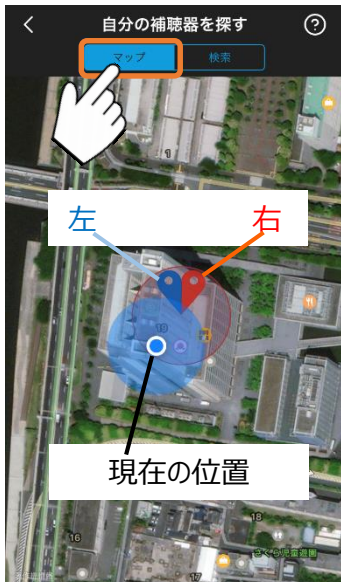



検索

補聴器からの信号をスマートフォンが捉え、現在地からの距離を円で表示します。

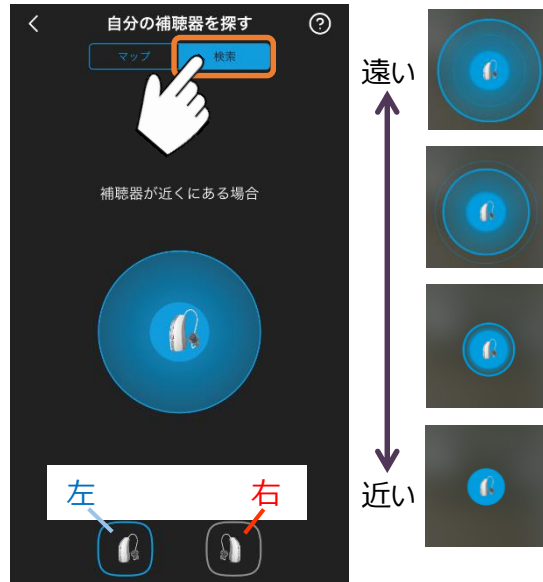

<聞きたい方向を選択>

一時的に前後左右のいずれか特定の方向^注からの音を中心に聞きたい場合に使用します。

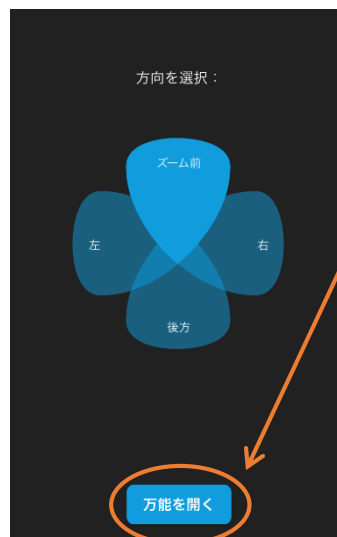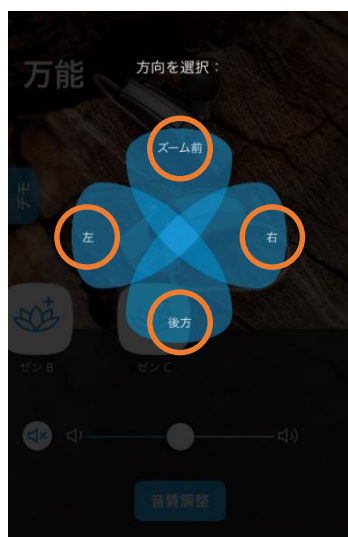

解除する場合は、再度聞きたい方向を選択アイコンをタップし、「万能を開く」をタップするか、メイン画面で他プログラムをタップします。




注 片耳装用の場合は、装用耳側と前後のみ

<EVOKEアプリ・補聴器のファームウェア更新>

EVOKEアプリの操作性向上や品質改善のため、アプリを更新することがあります。EVOKEアプリの更新については、AppストアやPlayストアからの通知があります。

注意：アプリの更新にはデータ通信量が多くなるため、Wi-Fi環境での更新をお勧めします。また、AppストアやPlayストアから通知がなくアプリの更新が行われる場合もあります。

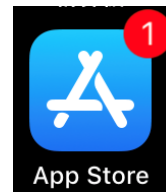


EVOKEアプリの更新後、EVOKEを接続した際に補聴器のファームウェアの更新を要求されることがあります。「更新」ボタンをタップして、補聴器のファームウェア更新をおこないます。

注意：補聴器の更新は15分以上かかる場合があるため、本作業は時間がある時におこなってください。

更新後、Bluetoothのリセットを要求されることがあります。リセット手順はお使いのスマートフォンによって異なります。下記手順を参考にBluetoothをリセットします。


iPhoneのBluetoothリセット手順

1. ホームキーなどでEVOKEアプリを閉じます。
2. スマートフォンの設定を開きます。
3. Bluetoothの項目を開き、Bluetoothをオフにします。10秒程度経ったら再度Bluetoothをオンにします。

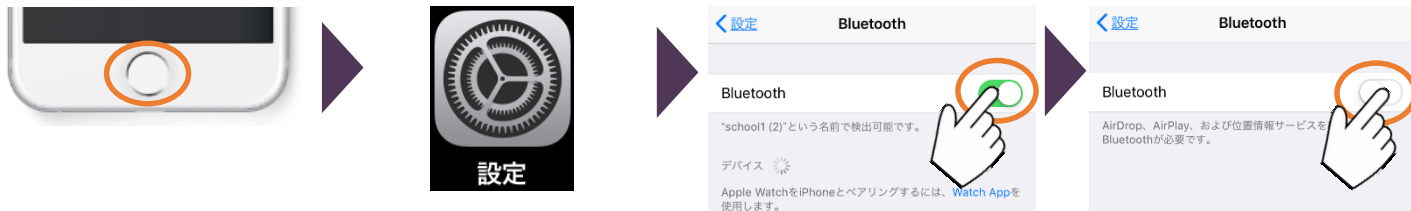

AndroidのBluetoothリセット手順

1. ホームキーなどでEVOKEアプリを閉じます。
2. スマートフォンの設定を開きます。
3. Bluetoothの項目を開き、補聴器のペアリングを解除します。

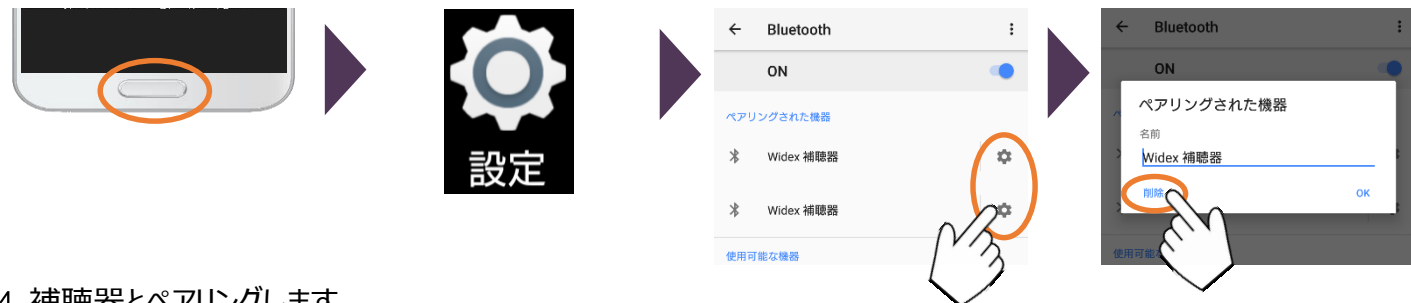

4. 補聴器とペアリングします。



Bluetoothリセット後




Bluetoothのリセットが終わったら、EVOKEアプリを起動し、お使いください。また、アプリ起動時に「利用規約」画面が表示されることがあります。「同意します」をタップしてください。



<補聴器のBluetoothのオフ>

スマートフォンとカーナビゲーションシステムがペアリングされている場合など、一時的にスマートフォンと補聴器の通信をおこないたくない場合があります。

このような場合は、EVOKEアプリから補聴器側のBluetoothをオフにします。

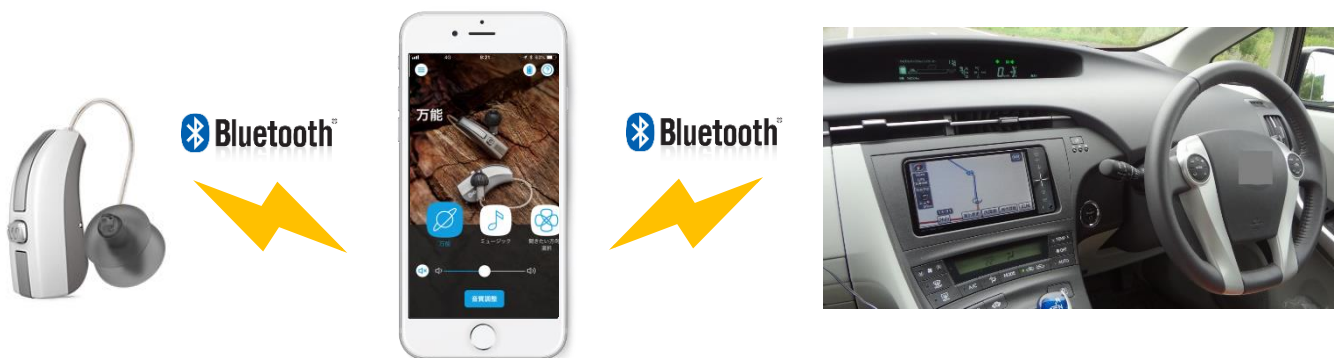

「☰」▶「補聴器のBluetooth」の順にタップします。

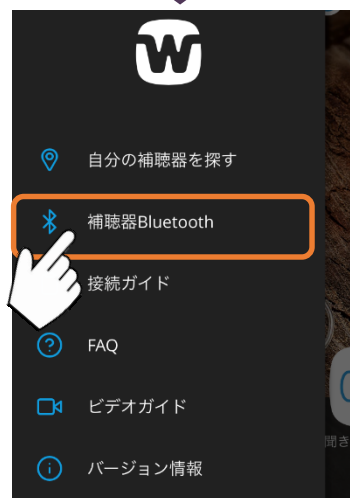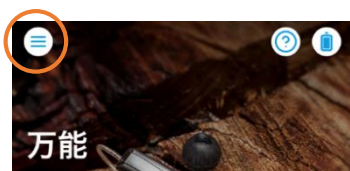

「Bluetoothをオフにする」をタップします。



補聴器との通信が切れます。再度接続するには、補聴器を再起動してください。



重要：スマートフォンと補聴器が接続できない場合

一度ペアリングすれば、EVOKEの電源をオンにするとEVOKEアプリは自動で接続します。もし接続できない場合は、次の手順をお試しください。

- EVOKEのバッテリードアを開け、5秒以上経過してから電源を入れ、しばらく待ってみる。
- 補聴器の電池を新しい電池に交換し、しばらく待ってみる。
- スマートフォンのBluetoothを一度オフにし、10秒程度経過してから再びオンにしてみる。
- Wi-Fiをオフにしてみる。
- スマートフォンを再起動してから、再度試してみる。