



# 今日からはじめる 補聴器使い方ガイド

**WIDEX**  
HIGH DEFINITION HEARING

## 耳あな型 補聴器




使用する電池

## 1 電池の入れ方



電池パックから電池を1つ取り出し、保護シールをはがします。

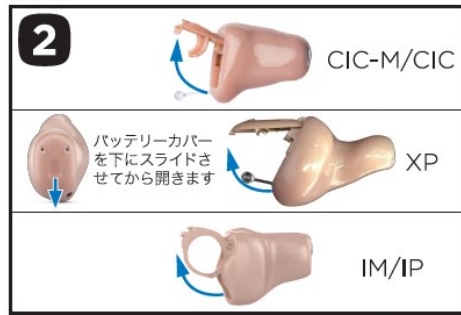

バッテリーホルダーを矢印の方向に開けます。




プラス面には  
十の刻印があります




電池のプラス(+)、マイナス(-)を確認し  
バッテリーホルダーに入れます。

## 2 装着の仕方

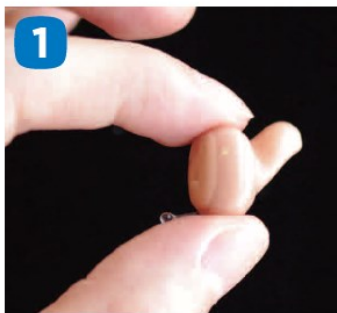

バッテリーカバーの上下をはさむようにシェル部分を持ちます。

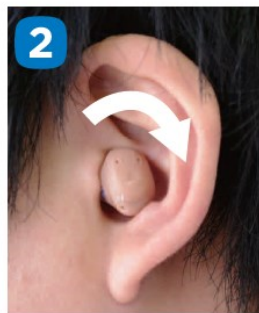

シェルを矢印方向に回しながら挿入します。



最後に指先で押してしっかりと収めます。



### 外すとき

テグス(テグス無しの場合)は指が掛かりやすい所をつまんで耳穴から少しずつ引き出します。ある程度出たところで、シェルをつまんで耳穴から取り出します。取り出しにくい時は入れた時と逆方向にシェルを回しながら取り出します。

(注)テグスをねじったり勢い良く引っ張らないようにしましょう。

## 故障かな?と思ったら

以下の項目をチェックしてみましょう。


### 音が出ない

- 電池は入っていますか?
- 電池のシールははがしましたか?
- 電池の+、-の向きが逆さまではありませんか?
- バッテリーホルダーは、しっかり閉まっていますか?

### 音が小さい


- 新しい電池と交換してみてください
- ボリュームコントロール付きの場合、ボリュームが下がっていませんか?
- 音の出口や入口に耳あかやゴミがつかまっていませんか?

各部の名称 (例:CICモデル)

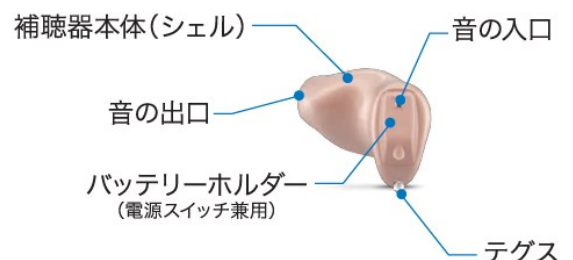

※モデルにより各部の位置が異なる場合があります。

# 3 お手入れの仕方

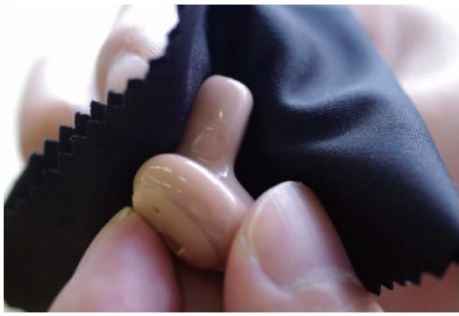

付属のクロスで表面の汚れを拭き取ります。




付属の掃除用ブラシを使って音の出口を下に向けてブラッシングします。

使用中のナノケアワックスガードをはずし、音の出口を軽くブラッシングをしてから新しいものを取り付けます。



交換用ナノケアワックスガード

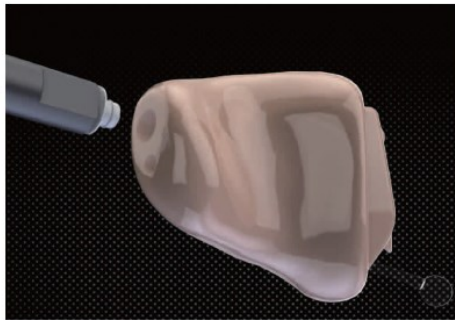

# 4 保管の仕方

湿気は補聴器の大敵です。電池を外し、バッテリーホルダーを開いた状態で「補聴器乾燥ケース」へ入れましょう。



電池は外します

乾燥剤は新しいものを使いましょう



青い粒がピンクになったら乾燥剤の交換時期です。



● ナノケアワックスガード (8本入り)

# 便利なお手入れ用品



● 補聴器掃除用ブラシ



ワイデックス株式会社

一般のお客様専用フリーダイヤル

TEL:0120-332-604

FAX:0120-332-394

補聴器のご相談、ご用命は当店へ。お気軽にご来店ください。