




WIDEX **MOMENT-**
SOVELLUS
PIKAOPAS

KAIKILLE WIDEX **MOMENT**
BLUETOOTH -KUULOKOJEILLE

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

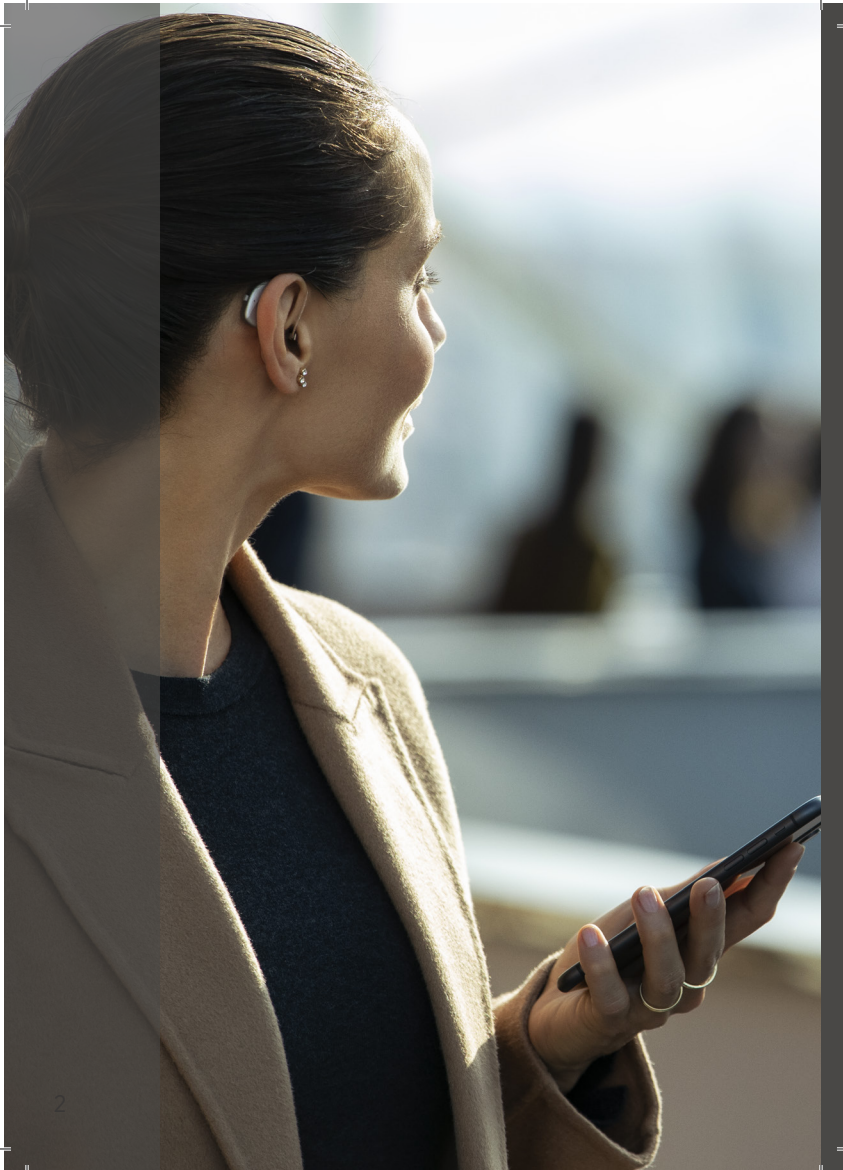

KÄYTÖN ALOITTAMINEN



WIDEX **MOMENT**-sovellus on suunniteltu toimimaan WIDEX **MOMENT** Bluetooth®-kuulokojeiden kanssa.

Sovelluksen avulla voit muokata ja yksilöidä kuulokojeidesi ääntä sekä suoratoistaa Apple-laitteista ja yhteensopivista Android-laitteista.

Voit ladata WIDEX MOMENT-sovelluksen App Storesta tai Google Play-kaupasta.



LAITEPARIN MUODOSTAMINEN WIDEX **MOMENT-** KOJEEN JA PUHELIMESI VÄLILLE

APPLE IOS

1. Siirry asetuksiin ja ota Bluetooth® käyttöön
2. Siirry kohtaan Asetukset > Käyttöapu > Kuulokojeet
3. Kytke kuulokojeet pois päältä ja takaisin päälle
4. Valitse kuulokojeet MFi-kuulokojeiden listasta ja valitse **Muodosta pari** kunkin kuulokojeen kohdalla
5. Kuulokojeesi on nyt pariliitetty puhelimeen ja ne ovat valmiita suoratoistamaan musiikkia ja puheluja
6. Avaa sovellus yhdistääksesi kuulokojeet sovellukseen



ANDROID


1. Siirry asetuksiin ja ota Bluetooth® käyttöön
2. Kytke kuulokojeet pois päältä ja takaisin päälle
3. Etsi kumpikin kuulokoje ja muodosta laitepari
4. Kuulokojeesi on nyt liitetty puhelimen kanssa, ja voit käyttää sovellusta

WIDEX **MOMENT**- KUULOKOJEIDEN PARITTAMINEN ANDROID-ÄLYPUHELIMEN KANSSA VOIDAAN TEHDÄ KAHDELLA ERI TAVALLA


1. Parita **MOMENT**-sovelluksen kautta. Tämä vaatii, että olet ladannut **MOMENT**- sovelluksen ANDROID-älypuhelimeesi.
2. Muodosta laitepari ANDROID-älypuhelimen Bluetooth-valikon kautta.

MUODOSTA PARILIITOS MOMENT-SOVELLUKSEN KAUTTA


ANDROID-ÄLYPUHELIN

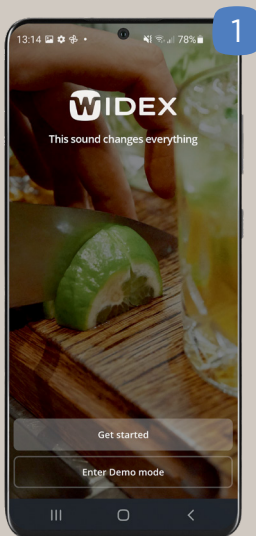

Valitse **MOMENT**-sovelluksen aloitusnäytössä
Aloita (Get started)

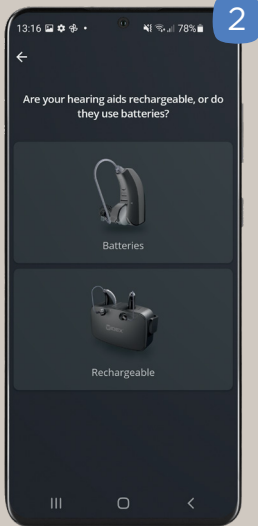


Valitse kuulokojeidesi käyttämä virtalähde ja klikkaa sitä vastaavaa kuvaketta.

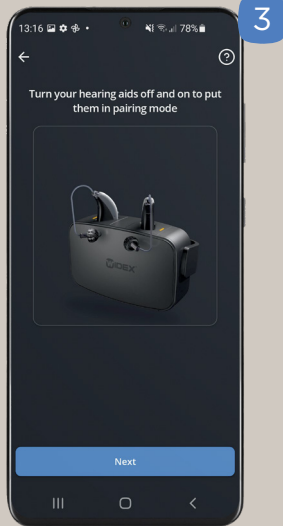


Kytke kuulokojeet pois päältä ja uudelleen päälle joko asettamalla ne 3-5 sekunniksi laturiin tai painamalla kuulokojeen painiketta 3-5 sekuntia kojeiden sulkemiseksi. Paina painiketta uudelleen 3-5 sekunnin ajan käynnistääksesi kojeet.*

Valitse **Seuraava** (Next)

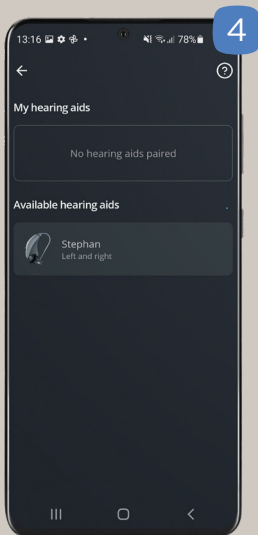


Valitse **Käytettävissä** olevat kuulokojeet (Available hearing aids) ja sovellus aloittaa pariliitoksen muodostamisen

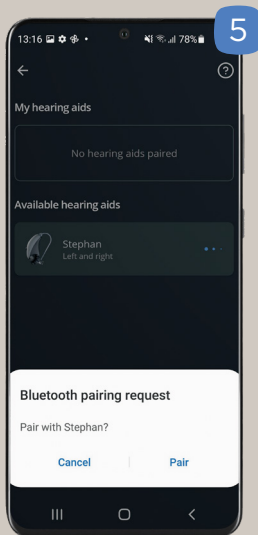


Valitse **Muodosta pariliitos** (Pair) molemmille kuulukojeille

* Mikäli kuulukojeesi virtalähde on paristo, avaa/sulje paristokotelo kojeen käynnistämiseksi uudelleen

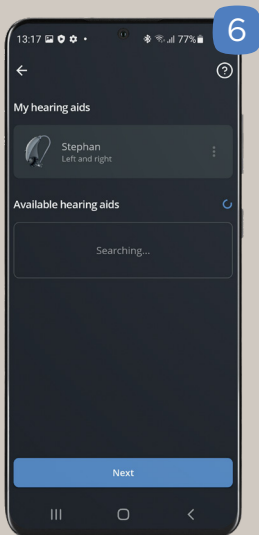


Kuulokojeet on nyt
paritettu ja näkyvät
kohdassa Kuulokojeeni
(My hearing aids)

Valitse **Seuraava** (Next)

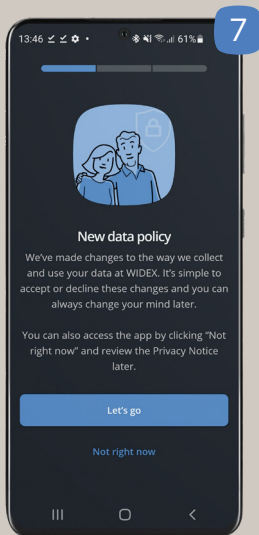

Valinnainen.
Suostumus
tietosuojakäytäntöön.

Vastaus **"Mennään"** (Let's go)
auttaa sovellusta parantamaan
kuulokojeidesi asetuksia
yhdessä kanssasi.

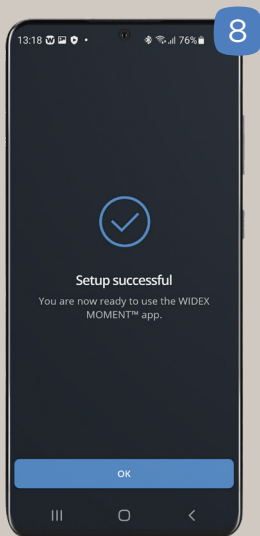


Asennus onnistui
Valitse **OK**




MOMENT-sovellus
Kotinäköm

Voit nyt käyttää pariliitettjä
kuulokojeitasi **MOMENT**-
sovelluksen kanssa.
Nauti äänien maailmasta
WIDEX MOMENT-
kuulokojeidesi kanssa

MUODOSTA PARILIIKOS ANDROID- ÄLYPUHELIMEN BLUETOOTH-VALIKON KAUTTA

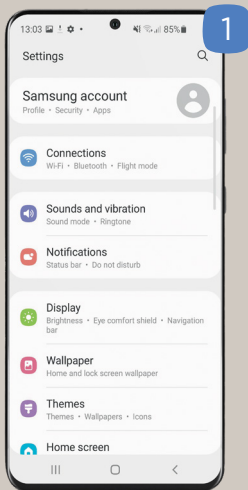


Valitse ANDROID-
älypuhelimesta **Asetukset**
(Settings)

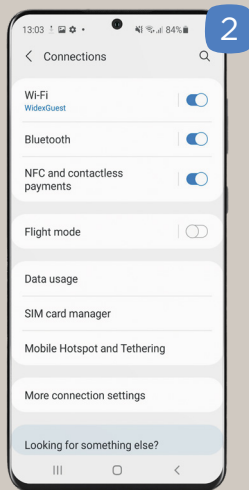

Valitse **Bluetooth**

Valitse **Yhteydet** (Connections)

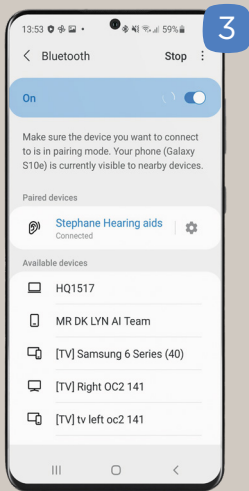

Kytke kuulokojeet pois päältä ja uudelleen päälle. Paina kuulokojeen painiketta 3-5 sekuntia kojeiden sulkemiseksi. Paina painiketta uudelleen 3-5 sekunnin ajan käynnistääksesi kojeet.*

Valitse kuulokojeesi **Käytettävissä olevat laitteet**-listalta (Available devices) pariliittääksesi ne puhelimen kanssa.

Haluatko nimetä kuulokojeet uudelleen? Valitse Asetukset-ikoni kuulokojeiden nimen vieressä.



Voit nyt käyttää pariliitettöjä kuulokojeitasi **MOMENT**-sovelluksen kanssa. Nauti äänien maailmasta **WIDEX MOMENT**-kuulokojeidesi kanssa

* Mikäli kuulokojeesi virtalähde on paristo, avaa/sulje paristokotelo kojeen käynnistämiseksi uudelleen

WIDEX MOMENT- SOVELLUS ALOITUSNÄYTTÖ

Sovelluksensisäiset ohjeet

Yhteys
tai akun tila

Palauta ääni

Lisää vaihtoehtoja
(ei-äänisäädöt)

Tallenna muutokset
henkilökohtaisena
ohjelmaksi

Mykistys ja
äänenvoimakkuus


Muu äänensäätö

Valitse ohjelma

Etusivu ja Valikko

My Sound

My Guide

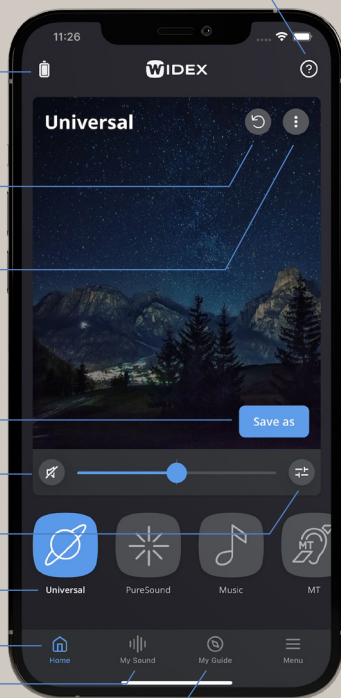



PYSY AJAN TASALLA

Saat ajoittain automaattisia ilmoituksia, kun puhelimeesi ja kuulokojeisiisi on saatavilla päivityksiä. On tärkeää, että hyväksyt päivitykset.

JAA TOSIELÄMÄN TIETOSI

WIDEX **MOMENT**-sovelluksessa sinua pyydetään antamaan suostumus joidenkin tietojen jakamiseen.

Ensin sinua pyydetään jakamaan tietoja Widexille. Tämä auttaa meitä parantamaan kuuntelukokemustasi ja tekemään tulevia kuulokojeita entistäkin paremmiksi.

Seuraavaksi sinua saatetaan pyytää antamaan suostumuksesi tietojen jakamiseen kuuloalan ammattilaisen kanssa. Sinulta kysytään vain, jos olet jo sopinut tästä kuuloalan ammattilaisesi kanssa.

Näiden tietojen jakaminen tarkoittaa, että kuuloalan ammattilainen saa käyttöönsä sovelluksessa tekemäsi kuulemisen säädöt. Näin he voivat sovittaa kuulokojeesi entistäkin yksilöllisemmin.

Kaikki tiedot salataan turvallisesti.



SUUNNITTELE OMA KUULEMISESI

Voit säätää kuulokojeesi ääntä milloin tahansa. Säädot eivät muuta asetuksia, jotka kuuloalan ammattilainen on kuulokojeeseesi luonut.

Voit säätää ääntä kolmella tavalla:


- **My Sound**, jossa on SoundSense Learn
- Yleiset äänen säädöt
- Suunnattu tarkennus

SINULLE TEHTY ÄÄNI

Sovelluksen **My Sound**-osa hyödyntää tekoälyä säätämään äänen juuri sinulle sopivaksi.

Tekoäly voi soittaa sinulle joukon äänivertailuja, joiden avulla voit muokata ääntä tilanteeseen sopivaksi, tai voit valita automaattisesti luodun ääniprofiilin, joka on luotu maailman muiden WIDEX **MOMENT**-käyttäjien kokemusten pohjalta!

1. Avaa **My Sound**
2. Aloita äänen optimoiminen painamalla **Aloita**
3. Valitse **Tilanne** ja **Tarkoitus**
4. Sovellus tarjoaa kaksi tekoälyn luomaa **Tehty sinulle**-suositusta...
5. Tai valitse **Luo oma**, jolloin tekoäly opastaa sinua muokkaamaan ääntä joukolla äänivertailuja.

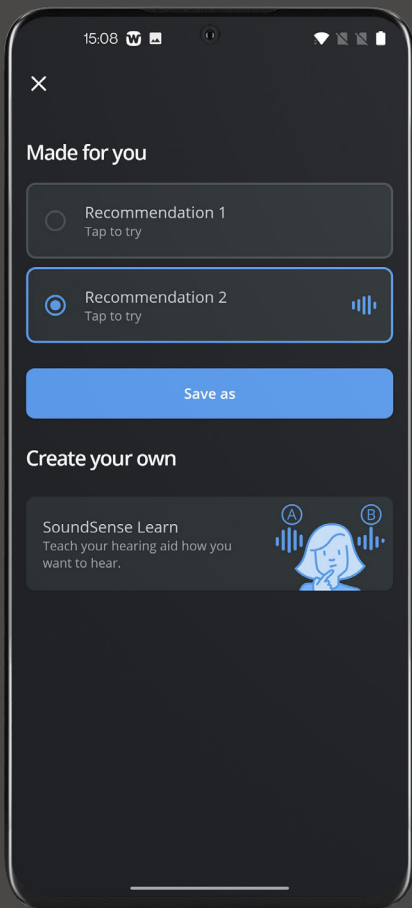


SOUNDSENSE LEARN

SoundSense Learn on yksinkertainen toiminto, joka käyttää tekoälyä ja opastaa sinut helposti kohti ääntä, joka on räätälöity tiettyihin tilanteisiin.


Pääset toimintoon aloitusnäytön alaosasta.

SoundSense Learn esittelee kaksi ääniprofiilia, A ja B. Kuuntele profiilit ja käytä sinistä liukusäädintä osoittamaan haluamaasi. Kun painat **Seuraava**, esiin tulee kaksi uutta valintaasi perustuvaa ääniprofiilia.

On suositeltavaa jatkaa prosessia, kunnes se on valmis. Tämän jälkeen voit tallentaa muokkaukset henkilökohtaisiksi ohjelmiksi.

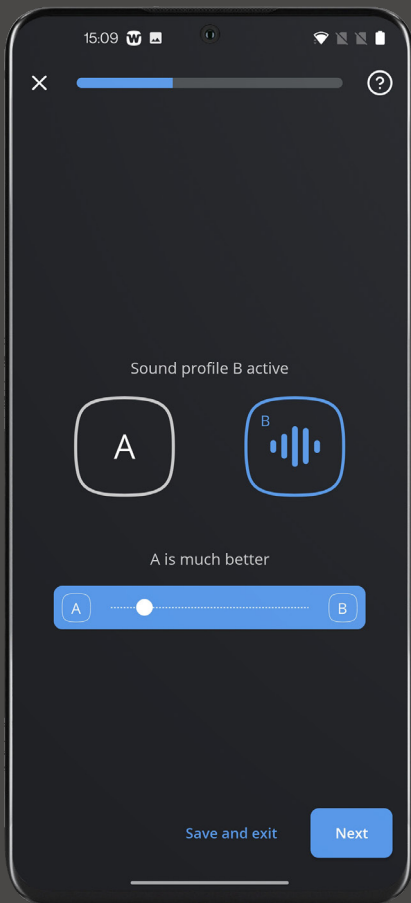

YLEISET ÄÄNEN SÄÄDÖT

Voit käyttää yleisiä äänensäätöjä painamalla aloitusnäytön kuvaketta  :


- V/O-äänenvoimakkuus: Säädä kunkin kuulokojeen äänenvoimakkuutta yksitellen
- Taajuuskorjain: Säädä basso-, keski- tai diskanttiääntä saadaksesi henkilökohtaisempaa ääntä- tai valitse jokin näytön alalaidan esiasetuksista
- Äänisekoitin: Valitse, haluatko kuulokojeiden keskittyvän ympäristöösi vai toiseen äänilähteeseen, kuten suoratoistoon (näkyvissä vain suoratoiston ja tiettyjen ohjelmien aikana)


HENKILÖKOHTAISET OHJELMAT

Kun olet tehnyt säädöt ja löytänyt äänen, johon olet tyytyväinen, voit tallentaa sen. Valitse aloitusnäytöstä **Tallenna nimellä** ja anna ohjelmalle nimi ja kuvake. Voit lisätä ohjelmaan myös sijainnin painalla ko. ohjelmaa pitkään. Näin kuulokojeet vaihtavat automaattisesti kyseiseen ohjelmaan, kun vieraillet sijainnissa uudelleen.

SUUNNATTU TARKENNUS

Suunnatun tarkennuksen avulla voit keskittyä ääneen, joka on peräisin edestä, takaa, vasemmalta tai oikealta.

Valitse suunnattu tarkennus  ohjelmista kotinäytöltä ja valitse suunta, johon haluat keskittyä.

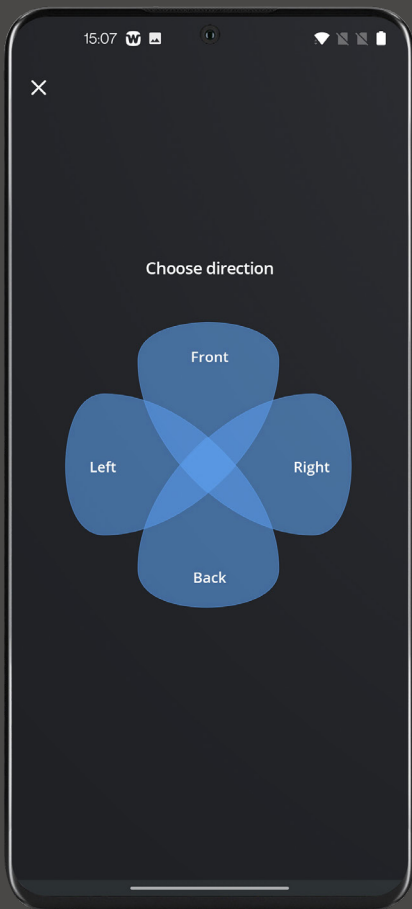

VIAN ETSINTÄ

Jos laiteparin muodostuksen yhteydessä ilmenee ongelmia:

- Tarkista, että Bluetooth® on aktivoitu ja että kuulokojeet ovat lähellä puhelinta.
- Vaihda/lataa kuulokojeen paristot
- Sammuta kuulokojeet ja kytke ne uudelleen päälle. Kuulokojeet ovat pariliitostilassa ensimmäisten kolmen minuutin ajan sen jälkeen, kun ne on kytketty päälle
- Aktivoi ja deaktivoi lentotila puhelimesi asetuksista
- Varmista, että WIDEX **MOMENT**-sovelluksella on Bluetooth®-yhteys: Siirry Asetuksiin > WIDEX **MOMENT** ja aktivoi Bluetooth®

Jos se ei vielääkään toimi:

- Poista kuulokojeidesi pariliitos ja yhdistä uudelleen
- Sulje WIDEX **MOMENT**-sovellus, jos se on aktiivinen
- Käynnistä puhelimesi uudelleen
- Käynnistä kuulokojeet uudelleen ja aloita laiteparin muodostus

Jos sinulla on iOS-suoratoisto-ongelmia:

- Varmista, että kuulokojeet on pariliitetty puhelimeen
- Valitse Asetukset > Käyttöapu > Kuulokojeet > Äänen reititys. Varmista, että **Puheluäänet**-ja **Mediaäänet**-asetukset on asetettu kohtaan **Automaattisesti** tai **Aina kuulokojeisiin**.
- Aktivoi ja deaktivoi lentotila puhelimesi asetuksista
- Poista Wi-Fi käytöstä puhelimestasi

LISÄTIETOJA

www.widex.com/fi-fi/apps/

TUTUSTU JA TILAA TARVIKKEITA:

www.widexkauppa.fi

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



Painettu 2021-01. 9 502 5402 013

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:in palvelutuotemerkki.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.