




WIDEX **MOMENT**™

APP GUIDE

TIL ALLE WIDEX **MOMENT**
BLUETOOTH-HØREAPPARATER

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

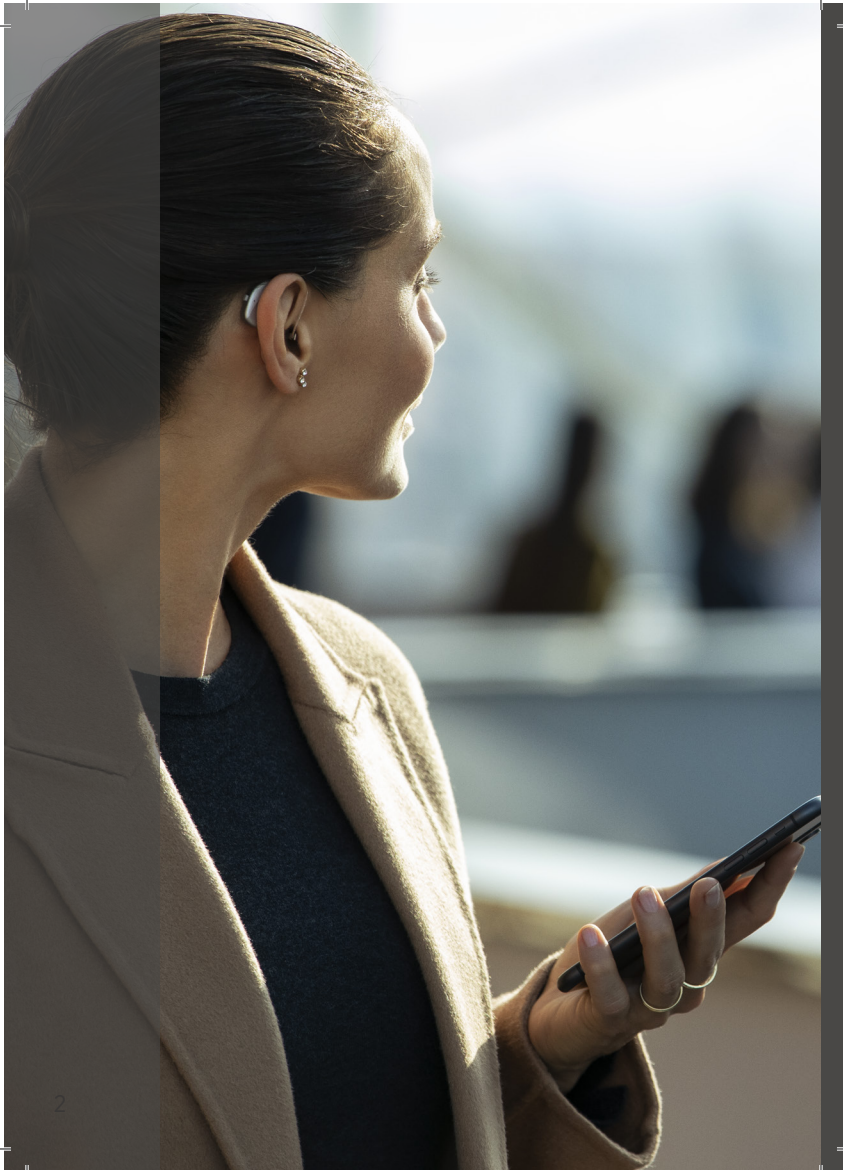

KOM I GANG



mRIC R D

RIC 312 D

BTE 13 D

BTE R D

WIDEX **MOMENT™** app er designet for å brukes med WIDEX **MOMENT™** Bluetooth® høreapparat. Med appen kan du kontrollere og sette personlige preferanser på lydjusteringene i høreapparatet.

Når du har parett telefonen og høreapparatene kan du streamme lyd direkte fra din kompatible iOS eller Android enhet. Du kan se en liste over kompatible enheter på: Widex.com.

Du kan laste ned WIDEX **MOMENT** appen fra App Store eller Google Play.



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play

SLIK PARER DU DINE HØREAPPARATER TIL APPLE IOS ENHETER




PARING AV WIDEX MOMENT APP


APPLE iOS TELEFON

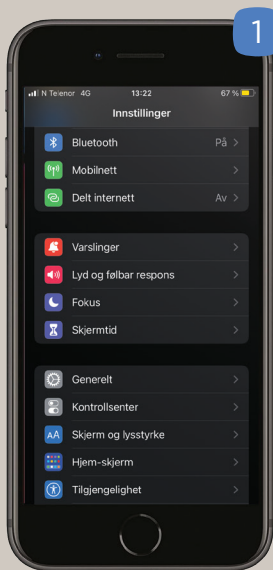

Gå til Innstillinger på telefonen
og aktiver **Bluetooth®** (På)

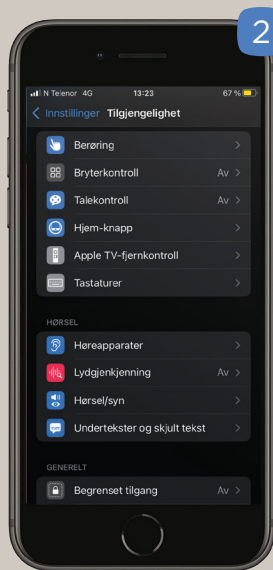


Deretter Innstillinger
> Tilgjengelighet
> Høreapparater

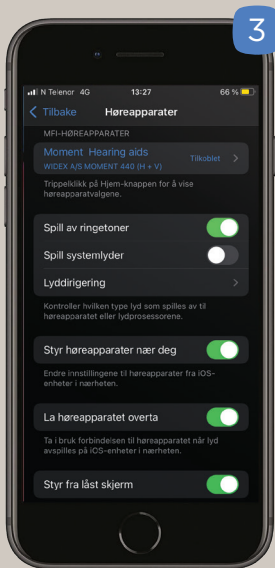

Skru dine høreapparat
AV og **PÅ** igjen.


Telefonen skal da klare å finne høreapparater med Bluetooth i nærheten. Når telefonen finner høreapparatet, **trykk på navnet for å pare med telefonen.**

Pass på at **"Spill av systemlyd"** er **AV** – for beste opplevelse.

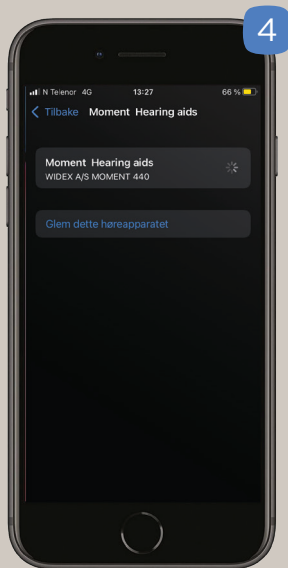

Bekreft tilkobling
tilhøreapparatene.

Høreapparatet er nå **tilkoblet**.

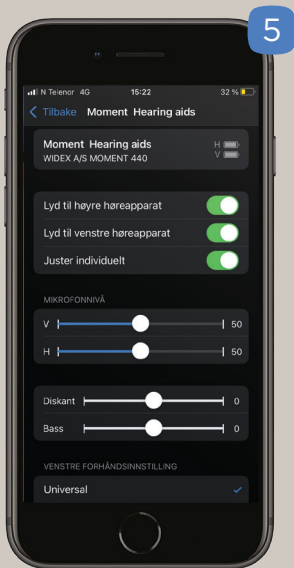

Høreapparat-menyen vil vise at høreapparatene er tilkoblet, og i menyen kan du justere lyden og bytte lytteprogram på høreapparatene.



MOMENT App – Hjem skjerm

Du kan nå bruke dine høreapparater sammen med **MOMENT** App.


Vi anbefaler brukeren alltid å laste ned nyeste oppdatering av WIDEX MOMENT APP for økt stabilitet og lyd i høreapparatene.

PARING AV DINE
WIDEX **MOMENT**TM
HØREAPPARAT
TIL EN ANDROID
SMARTTELEFON
KAN GJØRES
PÅ TO MÅTER


1. Paring via **MOMENT** App: Dette krever at du har lastet ned **MOMENT** App for ANDROID.
2. Paring via Bluetooth® meny på din ANDROID telefon.

PARING AV WIDEX **MOMENT** APP


ANDROID SMARTTELEFON

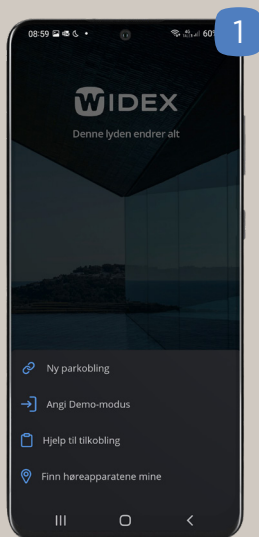

Fra startskjermen i **MOMENT**
appen velg, **Ny parkobling**

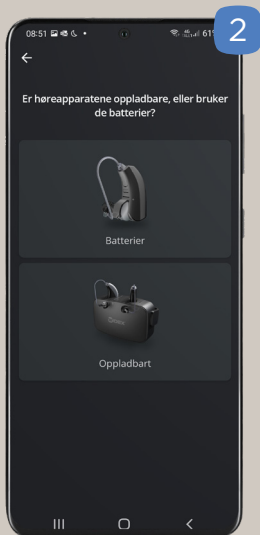


Velg hvilken type høreapparat du bruker. Klikk på bildet som passer med dine høreapparat.

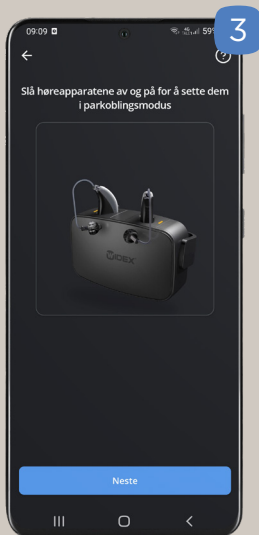


Skrú dine høreapparat **AV** og **PÅ** igjen ved å enten sette de i laderen i 5 sekunder eller ved å trykke på knappen i 5 sekunder for å skru de av, og deretter det samme for å skru de på.*

– Velg **Neste**

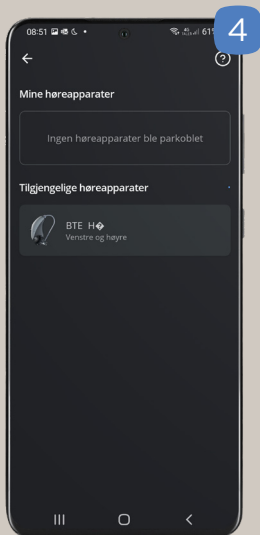


Velg det **tilgjengelige høreapparatet** og appen vil starte paringen.

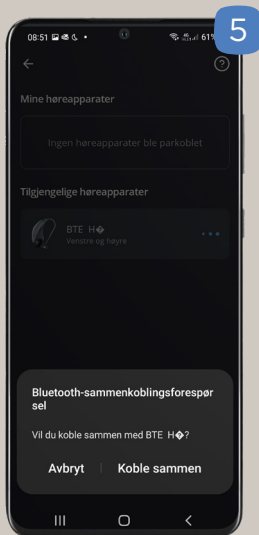


Velg **Koble sammen** for hvert høreapparat (venstre, høyre)

*For Moment RIC 312 D, skal du åpne og lukke batteriluken for å skru av/slå på høreapparatene.

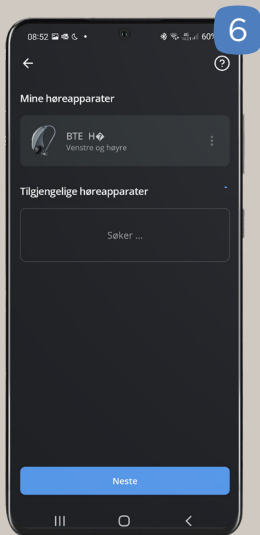


Dine høreapparat
er nå **paret** og valgt som
Mine høreapparat.

- Velg **Neste**

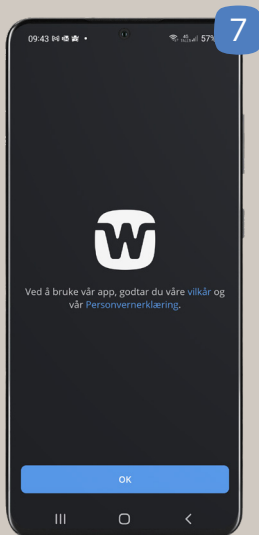


Valgfritt: Samtykke til vår
data policy.

Ved å samtykke
gjør at appen kan hjelpe
til med å tilpasse
høreapparatene til deg.

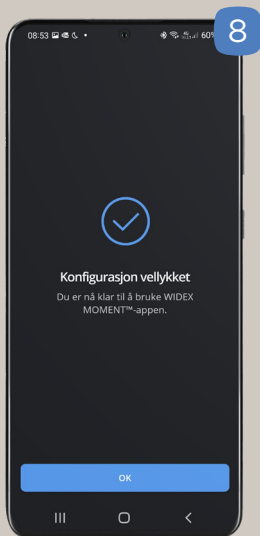

Oppsett vellykket.

- Velg OK


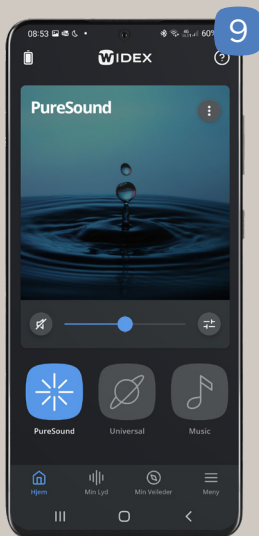


MOMENT App

- hjem skjerm


Du kan nå starte å bruke dine parede høreapparat med **MOMENT** app.

PAR VIA INSTILLINGER PÅ DIN ANDROID TELEFON

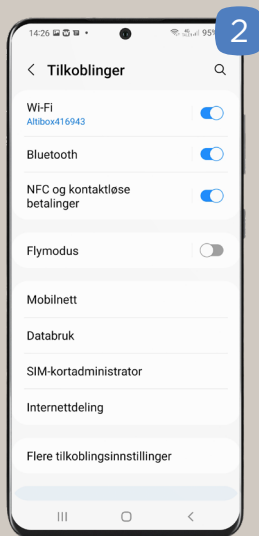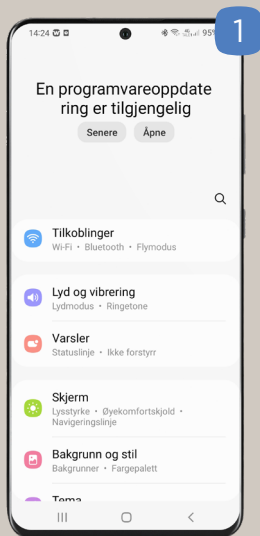

Gå til Innstillinger
– Velg Tilkoblinger


Velg Bluetooth®

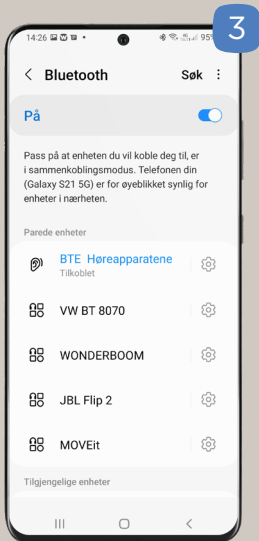

Skru høreapparatene AV- og PÅ igjen. Hold inne knappen i 3-5 sekunder for å slå dem av, deretter holder du inne i 3-5 sekunder igjen for å slå dem på.

Velg dine høreapparater under **Parede enheter** for å koble dem sammen med telefonen.

Vil du bytte navn på høreapparatene? Velg ikonet for instillinger ved siden av høreapparatnavnet.

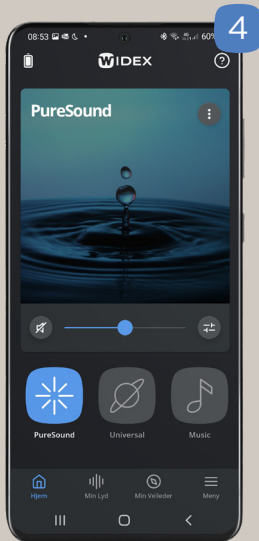

MOMENT App – hjem skjerm

Du kan nå starte å bruke dine parede høreapparater med **MOMENT** app.

WIDEX MOMENT APPENS STARTSKJERM

Hjelp i appen

Forbindelse eller
batteristatus

Tilbakestille lyd

Flere alternativer
(For andre justeringer
enn lydjusteringer)

Lagre endringer, som
personlig program

Slå av omgivelseslyder
/ Volum


Generelle
lydjusteringer

Velg program

Startside og meny

Min Lyd

Min Veileder

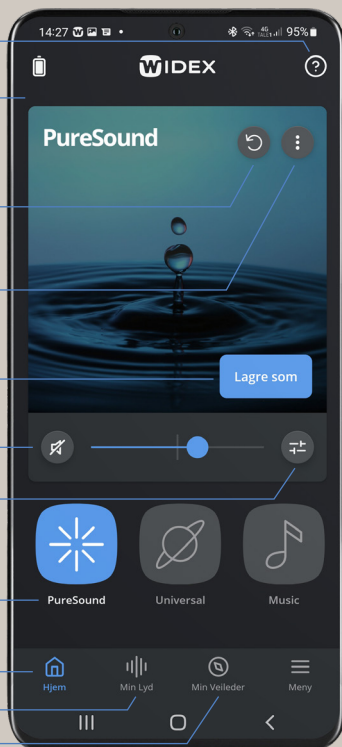



HOLD DEG OPPDATERT

Du vil fra tid til annen motta varsler fra appen om tilgjengelige oppdateringer. Det er viktig at du godtar oppdateringene for å få de nyeste funksjonene installert.

Få beskjed om nye oppdateringer ved å melde deg på vårt nyhetsbrev. Du kan registrere deg på [widex.com/nb-no/nyhetsbrev](https://www.widex.com/nb-no/nyhetsbrev)

DEL DINE SANNTIDSDATA

I WIDEX **MOMENT**-appen blir du bedt om å gi ditt samtykke til å dele visse typer data.

Det gjør det lettere for oss å forbedre lytteopplevelsen og gjøre fremtidige høreapparater enda bedre.

Alle data er forsvarlig kryptert.



DESIGN DIN EGEN HØRSEL

Du kan når som helst justere lyden i høreapparatene. Justeringene dine endrer ikke innstillingene som hørselsspesialisten har foretatt.

Du kan justere lyden på tre ulike måter:


- **Min Lyd** inklusiv SoundSense Learn
- Generelle lydjusteringer
- Retningsfokus

LYD TILPASSET FOR DEG

Funksjonen **Min Lyd** bruker kunstig intelligens for å hjelpe deg med å justere lyden i høreapparatene, slik at den passer perfekt til deg, uten hjelp fra en hørselsspesialist.

Du kan velge å la appens kunstige intelligens guide deg gjennom en rekke lydsammensetninger, slik at du kan skreddersy lyden til din spesifikke situasjon. Alternativt kan du velge en lydprofil som er automatisk generert ut i fra andre WIDEX **MOMENT** brukeres preferanser i tilsvarende situasjoner verden over.

1. Velg **Min Lyd**
2. Trykk på **Kom i gang** for å optimalisere din lyd
3. Velg din aktuelle **aktivitet /situasjon**
4. Appen gir deg to **2 anbefalinger**
5. Er du fornøyd med anbefalingene og vil bruke de igjen, kan du vege å lagre den
6. Du kan også velge å **tilpasse lyden** på egenhånd ved å lage ditt eget

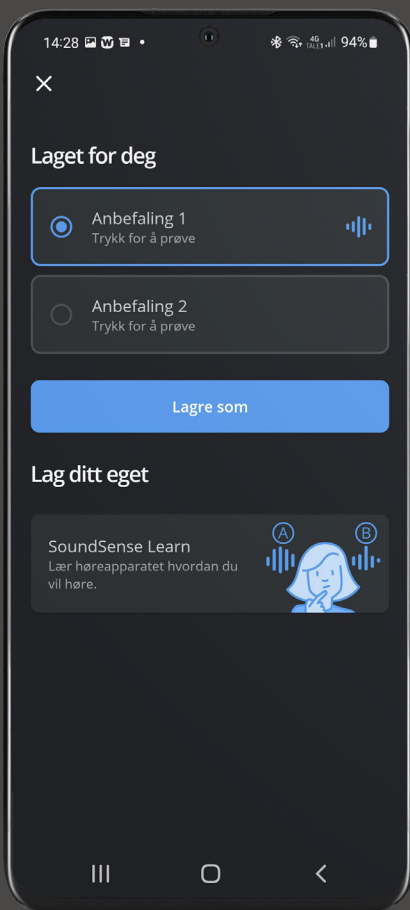

SOUNDSENSE LEARN

SoundSense Learn er en ukomplisert funksjon som ved hjelp av kunstig intelligens guider deg frem til en lyd som er tilpasset bestemte situasjoner.


Du får tilgang til funksjonen på nedre del av startskjermen.

SoundSense Learn viser deg to lydprofiler: A og B. Lytt til de to lydprofilene og bruk den blå glidebryteren til å velge den du foretrekker. Når du har trykket på **Neste**, vises det to nye lydprofiler basert på det du har valgt.

Vi anbefaler at du fortsetter med denne prosessen helt til den er fullført. Etterpå kan du lagre justeringene dine som et personlig program.



GENERELLE LYDJUSTERINGER

Trykk på ikonet  på startskjermen for å åpne de generelle lydjusteringene:

- V/H volum: Juster volumet for venstre, eller høyre høreapparat
- Frekvensutjevner: Juster bass, mellomtone eller diskant i lydbildet for å få en mer personlig tilpasset lyd – eller velg en av forhåndsinnstillingene nederst på skjermen
- Lydmikser: Velg om du vil at høreapparatene skal fokusere på omgivelsene eller en annen inngang, for eksempel streaming (dette valget er bare synlig under streaming og i spesifikke programmer)


PERSONLIGE PROGRAMMER

Når du har gjort justeringene dine og har funnet et lydbilde du er fornøyd med, kan du lagre det. Velg **Lagre som** på startskjermen og gi programmet et navn og et ikon. Du kan også legge til et sted for programmet ved å trykke lenge på programmet. På den måten veksler høreapparatene automatisk til dette programmet når du besøker det samme stedet.

OBS: Dersom du sletter MOMENT APP fra telefonen din mister du dine personlige programmer.

RETNINGSFOKUS

Med retningsfokus kan du velge å fokusere på lyd som kommer forfra, bakfra, fra venstre eller høyre.

Velg retningsfokusprogrammet  fra programmene på startskjermen og velg hvilken retning du ønsker å fokusere på.

PROBLEMLØSNING

Hvis du opplever problemer med parkobling:

- Sjekk at Bluetooth® er aktivert og at høreapparatene befinner seg i nærheten av telefonen
- Skifte/lade batteriene i høreapparatene
- Slå av høreapparatene og slå dem på igjen. Høreapparatene er i parkoblingsmodus de første tre minuttene etter at de er slått på
- Aktiver og deaktivert flymodus i innstillingene for telefonen
- Sjekk at WIDEX **MOMENT**-appen har tilgang til Bluetooth®: Åpne Innstillinger > WIDEX **MOMENT** og aktiver Bluetooth®

Hvis det fortsatt ikke fungerer:

- Hvis WIDEX **MOMENT**-appen er aktiv, lukker du den
- Opphev parkobling og parkoble høreapparatene på nytt
- Start telefonen på nytt
- Start høreapparatene på nytt og begynn parkoblingen på nytt

Hvis du får problemer med streaming i iOS:

- Forsikre deg om at høreapparatene er sammenkoblet med telefonen
- Åpne Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater <> Lydruting. Kontroller at **samtalelyd** og **medielyd** er satt til **Automatisk** eller **Alltid høreapparater**
- Forsøk å aktiver og deaktivert flymodus i innstillingene for telefonen
- Forsøk å deaktivert Wi-Fi på telefonen din
- Forsøk å slå telefonen AV og PÅ.
- Forsøk å slett høreapparatene fra telefonen, og sammenkoble dem på nytt igjen.
- Dersom du bytter til en nyere telefon, husk å slette paringen fra den gamle telefonen.

FOR MER SUPPORT:

www.widex.com/nb-no/apps

GÅ IKKE GLIPP AV NYHETER OG OPPDATERINGER TIL DINE HØREAPPARATER:

www.widex.com/nb-no/nyhetsbrev

FINN OG BESTILL TILBEHØR:

www.widexbutikk.no



SOUND LIKE NO OTHER



Trykket 2022-01. 9 502 5401 010

Apple og Apple-logoen er varemerker registrert av Apple Inc. i USA og andre land. App Store er et servicemerke registrert av Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker registrert av Google Inc.

Rett til endringer uten varsel forbeholdes.