



WIDEX **MOMENT**[™]-APPEN

SNABBGUIDE

FÖR ALLA WIDEX **MOMENT**
-HÖRAPPARATER MED BLUETOOTH

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



KOM IGÅNG



WIDEX **MOMENT**-appen är utformad för att fungera med WIDEX **MOMENT**-hörapparater med Bluetooth®.

Med appen, kan du kontrollera och individualisera dina hörapparater samt streama ljud direkt från iOS och Android enheter.

Du kan hämta appen WIDEX **MOMENT** i App Store eller Google Play.



PARKOPPLA WIDEX MOMENT MED DIN TELEFON



APPLE IOS

1. Gå till Inställningar och aktivera Bluetooth®
2. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Hörapparater
3. Stäng av dina hörapparater och slå på dem igen
4. Välj dina hörapparater från MFI-hörapparaterna och tryck på **Parkoppla** för varje hörapparat
5. Hörapparaterna är nu parkopplade med din telefon och redo att streama musik och samtal
6. Öppna appen för att ansluta dina hörapparater till appen

ANDROID


1. Gå till Inställningar och aktivera Bluetooth®
2. Stäng av dina hörapparater och slå på dem igen
3. Hitta och parkoppla varje hörapparat
4. Dina hörapparater är nu parkopplade med telefonen och du kan använda appen

DU KAN PARA DINA WIDEX **MOMENT** HÖRAPPARATER TILL EN ANDROID SMARTPHONE PÅ TVÅ SÄTT


1. Para via **MOMENT** appen. Detta kräver att du har laddat ner **MOMENT** appen för ANDROID.
2. Para via Bluetooth menyn på din ANDROID telefon.

PARA VIA **MOMENT** APPEN


ANDROID SMARTPHONE

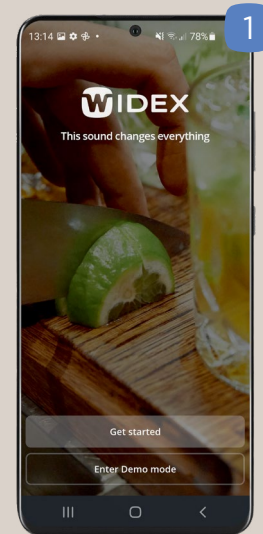

På **MOMENT** appens hemskärm
väljer du **GET STARTED**

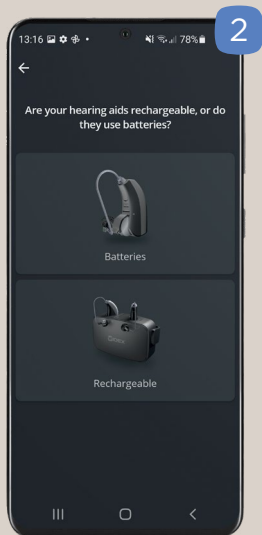


Välj vilken kraftkälla som dina hörapparater använder och klicka på bilden som matchar dina hörapparater.

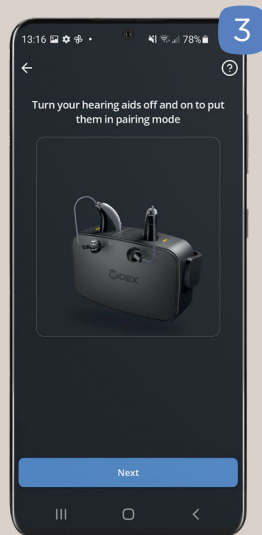


Stäng av dina hörapparater, sen på igen. Detta gör du antingen genom att placera dem i laddaren 3-5 sekunder eller trycka på knappen i 3-5 sekunder för att stänga av och sedan trycka igen 3-5 sekunder för att sätta på dem igen.*

Välj **NEXT**

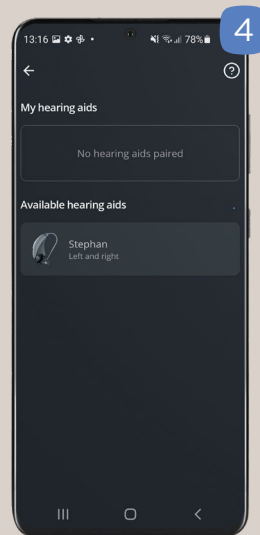


Välj **valbara hörapparater** (Available hearing aids) så kommer appen börja parningen.

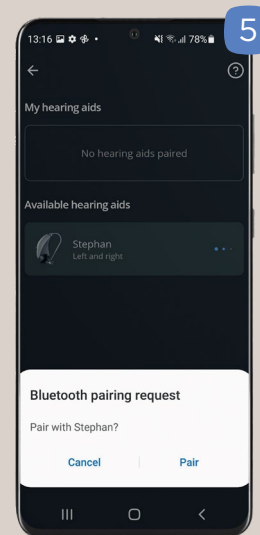


Välj **para** (Pair) för varje hörapparat.

*För hörapparater som använder batterier som kraftkälla, så ska du öppna och stänga batteridörren för att starta och stänga av dina hörapparater.

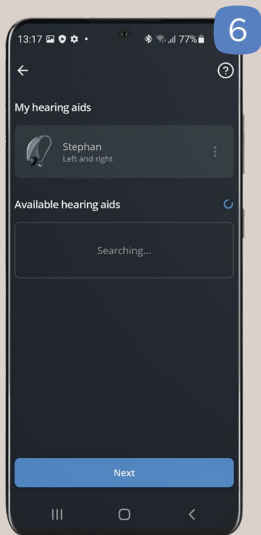


Hörapparaterna är nu parade och listade under mina hörapparater (My hearing aids)


Välj **nästa**

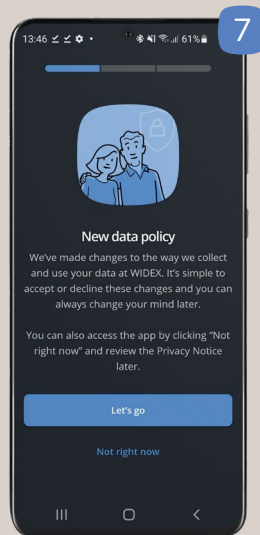

Valbart.
Godkänn vår datapolicy. Genom att **svara okej** (Let's go) kommer appen att hjälpa dig att förbättra dina hörapparaters inställningar.

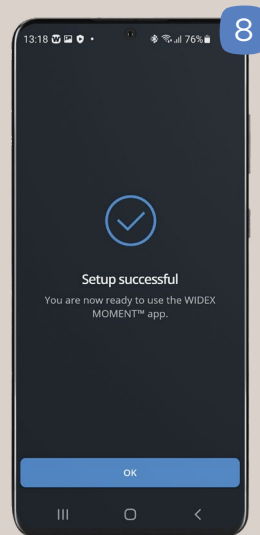


Kopplingen har lyckats
Välj **OK**

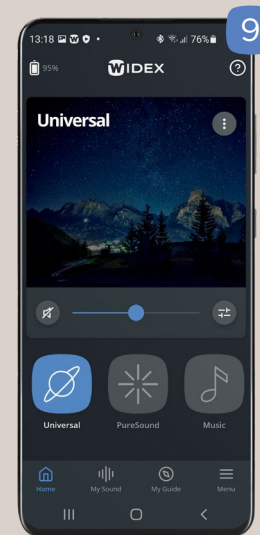


MOMENT appens hemskärm
Du kan nu börja använda dina parade WIDEX **MOMENT** hörapparater med **MOMENT** appen. Njut av en värld full av ljud med WIDEX **MOMENT**.

PARA VIA BLUETOOTH MENYN PÅ DIN ANDROIDA TELEFON

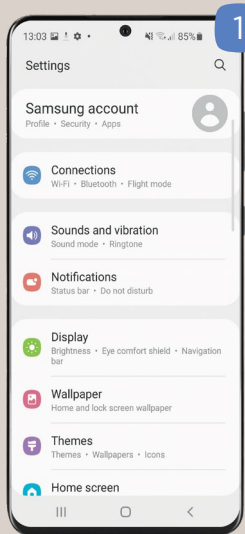


Åå till ANDROID SETTINGS

Välj **kopplingar** (Connections)

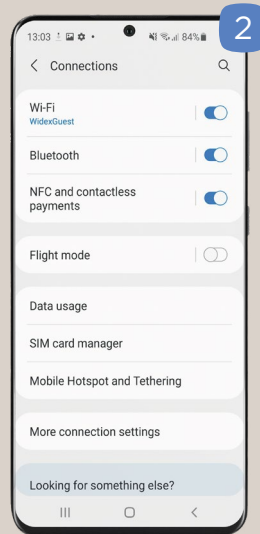


Select **Bluetooth**

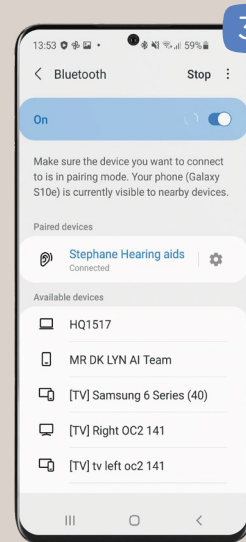

Stång av hörapparaterna och sätt sen på dem igen. Tryck på knappen i 3-5 sekunder för att stång av dem. Tryck igen i 3-5 sekunder för att sätta på dem igen.

Välj dina hörapparater under **tillgängliga enheter** (Available devices) för att para dem till din telefon.

Vill du byta namn på dina hörapparater? Välj då inställnings ikonen bredvid namnet på dina hörapparater.

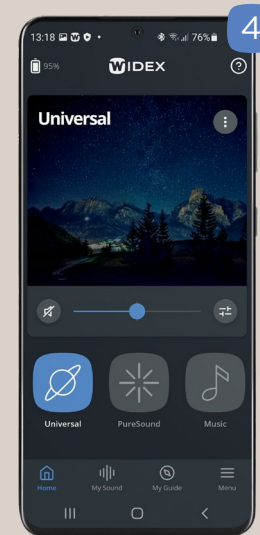

Du kan nu börja använda dina parade WIDEX **MOMENT** hörapparater med **MOMENT** appen. Njut av en värld full av ljud med WIDEX **MOMENT**.

WIDEX MOMENT -APPENS STARTSKÄRM

Hjälpinuti appen

Anslutning
eller batteristatus

Återställ ljud

Fler alternativ
(för icke-ljudjusteringar)

Spara ändringar som
ett personligt program

Ljud av och volym


Övriga
ljudjusteringar

Välj program

Hem och meny

My Sound

My Guide

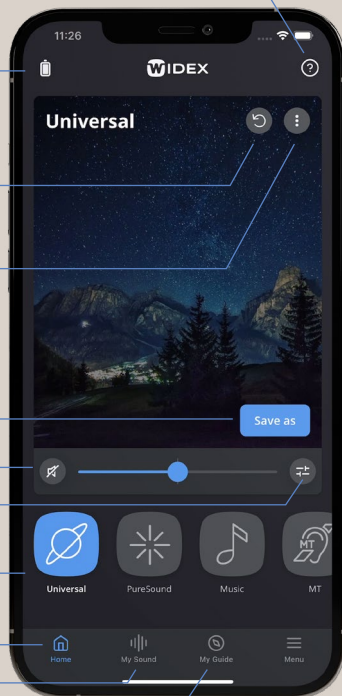

HÅLL DIG UPPDATERAD

Ibland får du automatiska meddelanden när det finns tillgängliga uppdateringar för din telefon och dina hörapparater. Det är viktigt att du godkänner uppdateringarna om du vill installera de senaste funktionerna.

Få notiser om nya uppdateringar genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev:
www.widex.com/sv-se/nyhetsbrev

DELA DINA DATA I VERKLIGA LIVET

I WIDEX **MOMENT**-appen ombeds du att lämna ditt samtycke till att dela vissa data.

Först blir du ombedd att dela data med Widex. Detta hjälper oss att förbättra din lyssningsupplevelse och göra framtida hörapparater ännu bättre.

Därefter kan du även bli ombedd att lämna ditt samtycke till att dela data med din audionom.

Du kommer endast att tillfrågas om du redan har samtyckt till detta med din audionom.

Att dela dessa data innebär att din audionom får tillgång till de hörseljusteringar du gör med appen. På så sätt kan du få en ännu mer personlig anpassning.

Alla data är säkert krypterade.



UTFORMA DIN EGEN HÖRSEL

Du kan alltid justera ljudet i dina hörapparater. Dina justeringar ändrar inte de inställningarna som din audionom har skapat.

Du kan justera ljudet på tre sätt:


- **My Sound** inklusive SoundSense Learn
- Allmänna ljudjusteringar
- Riktat fokus

LJUD ANPASSAT FÖR DIG

My Sound i appen använder AI för att hjälpa dig att justera ditt ljud så att det passar dig.

Du kan välja att låta AI guida dig genom en serie ljudjämförelser så att du kan anpassa ljudet till din specifika situation, eller så kan du välja en ljudprofil som har skapats automatiskt från andra WIDEX **MOMENT**-användares inställningar i liknande situationer över hela världen

1. Öppna **My Sound**
2. Tryck på **Kom igång** för att optimera ditt ljud
3. Välj en **Situation** och ett **Syfte**
4. Appen har två AI-baserade **Anpassat för dig**-rekommendationer...
5. Eller välj **Skapa din egen** för att låta vår AI guida dig till ett mer anpassat ljud via en serie ljudjämförelser.

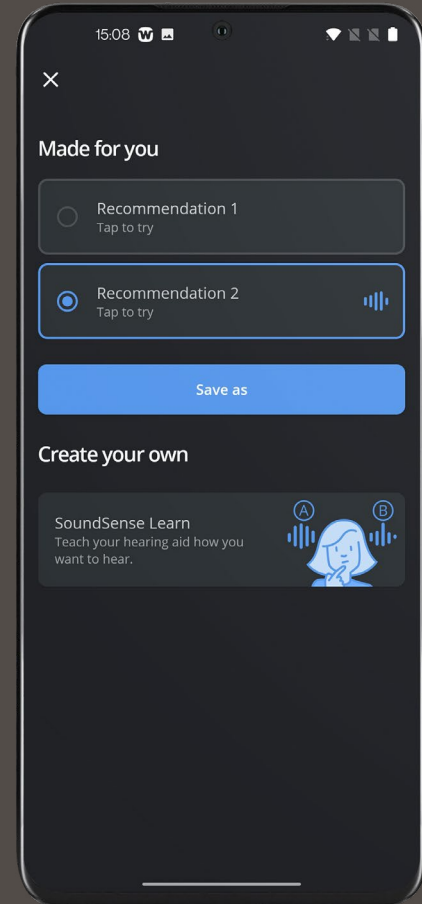


SOUNDSENSE LEARN

SoundSense Learn är en användarvänlig funktion som med hjälp av artificiell intelligens vägleder dig till ett ljud som är anpassat för specifika situationer.


Du kommer åt funktionen längst ned på startskärmen via **My Sound**.

SoundSense Learn presenterar två ljudprofiler: A och B. Lyssna på de två ljudprofilerna och använd det blå reglaget för att välja den profil du föredrar. När du trycker på **Nästa** visas två nya ljudprofiler som baseras på ditt val.

Vi rekommenderar att du fortsätter processen till den har slutförts. Därefter kan du spara dina justeringar som ett personligt program.

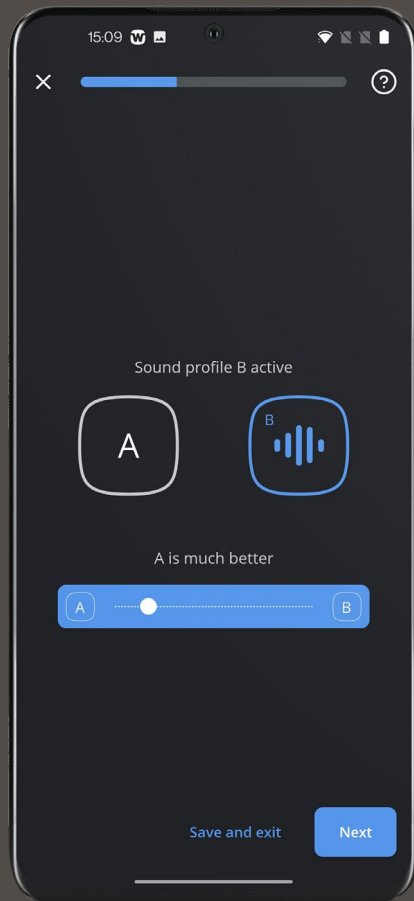

ALLMÄNNA LJUDJUSTERINGAR

Tryck på ikonen  på startskärmen för att gå till allmänna ljudjusteringar:


- V/H-volym: Justera volymen för varje hörapparat individuellt
- Equalizer: Justera ljudet i bas-, mellan- eller diskantregistret för att få ett mer personligt ljud – eller välj en av förinställningarna längst ned på skärmen
- Ljudmixer: Välj om du vill att dina hörapparater ska fokusera på omgivningen eller en andra ingång, som streaming (endast synlig under streaming och specifika program)


PERSONLIGA PROGRAM

När du har gjort dina justeringar och hittat ett ljud som du är nöjd med kan du spara det. Välj **Spara som** på startskärmen och ge programmet ett namn och en ikon. Du kan också lägga till en plats i programmet genom att trycka länge på programmet. På så sätt växlar hörapparaterna automatiskt till det programmet när du besöker platsen igen.

RIKTAT FOKUS

Med riktat fokus kan du välja att fokusera på ljud som kommer framifrån, bakifrån, från vänster eller från höger.

Välj programmet riktat fokus  från dina program på startskärmen och välj den riktning du vill fokusera på.

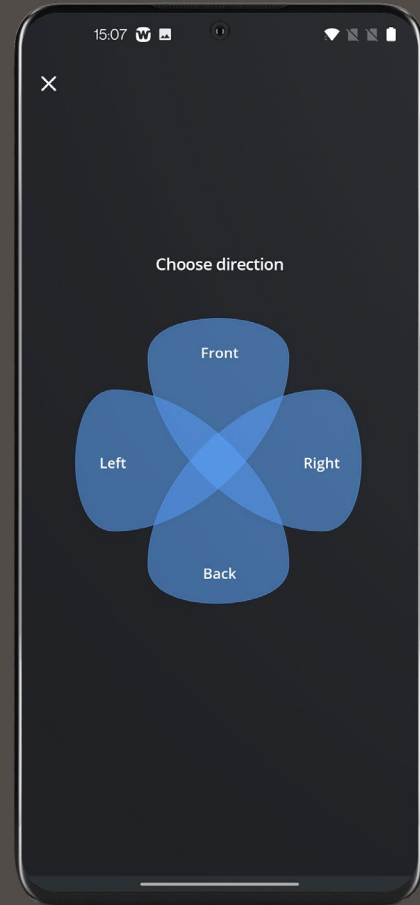

FELSÖKNING

Om du får problem med parkoppling:

- Kontrollera att Bluetooth® är aktiverat och att hörapparaterna är nära din telefon
- Byt eller ladda hörapparaternas batterier
- Stäng av hörapparaterna och slå sedan på dem igen. Hörapparaterna är i parkopplingsläge under de första tre minuterna efter att de har aktiverats
- Aktivera och avaktivera flygläge i telefonens inställningar
- Kontrollera att WIDEX **MOMENT**-appen har åtkomst till Bluetooth®: Gå till Inställningar > WIDEX **MOMENT** och aktivera Bluetooth®

Om det fortfarande inte fungerar:

- Ta bort parkopplingen och parkoppla hörapparaterna på nytt
- Stäng WIDEX **MOMENT**-appen om den är aktiv
- Starta om din telefon
- Starta om dina hörapparater och utför en ny parkoppling

Om du upplever streamingproblem med iOS:

- Kontrollera att hörapparaterna är parkopplade med telefonen
- Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Hörapparater > Ljudkoppling. Se till att **Samtalsljud** och **Medieljud** båda är inställda på **Automatisk** eller **Alltid hörapparater**
- Aktivera och avaktivera flygläge i telefonens inställningar
- Inaktivera wifi på din telefon

FÖR MER SUPPORT:

www.widex.com/sv-se/apps/

FÅ VÅRA NYHETSBRIV

www.widex.com/sv-se/nyhetsbrev

HITTA OCH BESTÄLL TILLBEHÖR

www.widexbutik.se



SOUND LIKE NO OTHER



Tryckt 2021-01. 9 052 5402 012

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Kan komma att ändras utan föregående meddelande.