



TONELINK™ APP

SNABBGUIDE

FÖR ALLA NYARE WIDEX-MODELLER

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



KOMMA IGÅNG

TONELINK-appen är utformad för att fungera med alla nyare **WIDEX** hörapparater och kan ansluta till Apple- och Android-telefoner.

Hämta **TONELINK**-appen från App Store eller Google Play.



SÅ FUNGERAR DEN

TONELINK -appen använder din telefons högtalare för att skicka instruktioner till dina hörapparater med hjälp av högfrekventa ljud.


Du måste parkoppla hörapparaterna med din telefon första gången du använder appen. Följ stegen på nästa sida och tänk på att du kanske måste justera telefonens volym under processen.

PARKOPPLA TONELINK MED DIN TELEFON

1. Öppna **TONELINK**-appen och följ instruktionerna på skärmen
2. Hitta och skanna QR-koden i bruksanvisningen till din hörapparat, om du fått en sådan av din audiom. Annars trycker du på **Hoppa över**
3. Starta om hörapparaterna genom att stänga av och på dem för att sedan sätta på dem igen
4. Parkoppla dina hörapparater med din telefon genom att trycka på **Parkoppla**
5. Om du hör ett ljud i hörapparaterna trycker du på **Ja**
6. Om du inte hör något ljud i hörapparaterna trycker du på **Nej**. Justera sedan volymen på din telefon och tryck på **Parkoppla** igen

TONELINK-appen hjälper dig att växla mellan program. Genom att skanna QR-koden från hörapparaternas bruksanvisning kan appen visa de program som är specifikt utvalda för dig.

TONELINK APPENS STARTSKÄRM

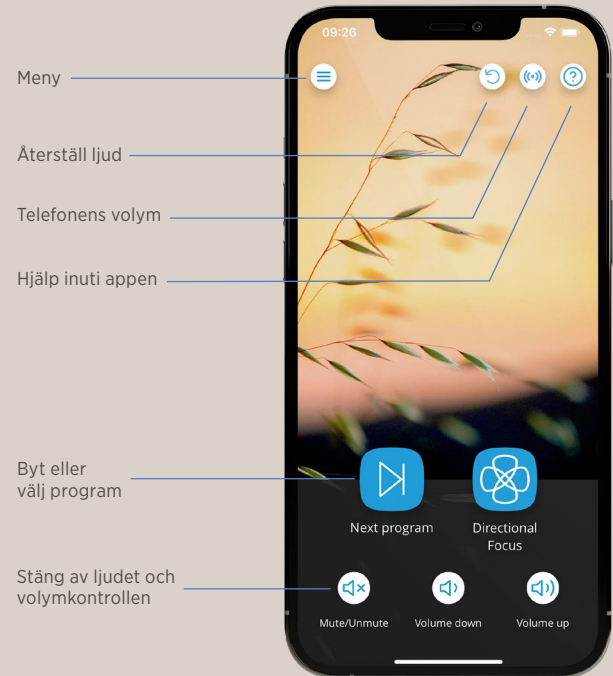

ENKEL KONTROLL ÖVER VIKTIGA FUNKTIONER



Med **TONELINK** kan du enkelt:

- Byta program
- Justera volymen
- Stänga av ljudet
- Ändra riktningsfokus

FÖR MER SUPPORT:

www.widex.com/sv-se/apps/

BESTÄLL TILLBEHÖR

www.widexbutik.se



SOUND LIKE NO OTHER



Tryckt 2021-01. 9 502 5403 012

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Kan komma att ändras utan föregående meddelande.